

AQUACEL® Ag Surgical

Curativo para cobertura cirúrgica de hidrofibra com prata

Descrição

AQUACEL® Ag Surgical reúne duas importantes tecnologias: Hydrofiber® e DuoDERM® Extra Fino em um único curativo estéril, macio, flexível e de alto desempenho. A combinação dessas tecnologias incluindo a extensibilidade e recuperação do curativo, foi elaborada especificamente para o tratamento de incisões cirúrgicas fechadas por primeira intenção, incluindo incisões de artroplastia de quadril e joelho em que o ferimento passa pelas articulações e a mobilidade é crítica.




Marca

Aquacel® Hydrofiber® DuoDERM®

Composição do Produto

- **Almofada interna de não tecido:** carboximetilcelulose sódica e prata iônica costurada com fios de nylon e elastano.
- **Camada externa de hidrocolóide:** Essa camada é revestida com filme poliuretano. Hidrocolóide: gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, Tetrakis, ester de pentaeritrol e óleo mineral.
- **Camada de contato com a pele:** Trilaminada, consiste em 2 camadas de hidrocolóide e 1 camada de filme poliuretano no meio.
- É utilizado papel siliconado para proteger a camada adesiva.

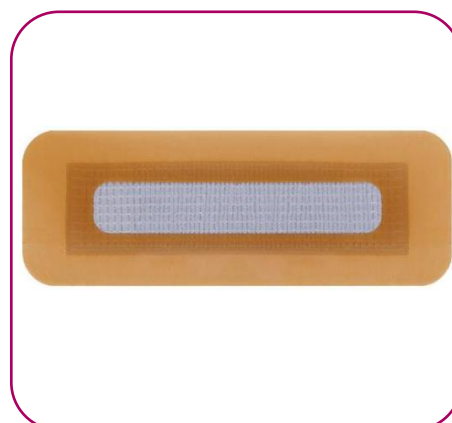

Características e Ações do Produto

AQUACEL® Ag Surgical tem demonstrado excelentes resultados na redução da formação de bolhas na pele devido a troca de curativos. Melhora significativa no tempo de desgaste. Por demandar menos trocas de curativos, exige menor tempo de hospitalização e uma significativa economia geral de gastos.

- **Tecnologia Hydrofiber®:** O exsudato da ferida é administrado pelo curativo através da capacidade de absorção e gelificação da Tecnologia Hydrofiber®. A camada hidrofílica de contato com a ferida cria um gel coeso em contato com o exsudato da ferida e moldando-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias podem crescer.
- **Capacidade de retenção:** A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retraindo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração.

AQUACEL® Ag Surgical

Curativo para cobertura cirúrgica de hidrofibra com prata

- **Camada de Hidrocolóide:** Proporciona uma aderência segura e suave à pele além de uma remoção não traumática do curativo, minimizando danos à pele intacta. Contribui para proteger a ferida de contaminação bacteriana e outras contaminações externas.
- **Flexibilidade e extensibilidade:** AQUACEL® Ag Surgical através da combinação da hidrofibra com hidrocolóide, é um curativo altamente flexível, inclusive quando utilizado em áreas articuladas como joelho, cotovelos, calcanhares, entre outras. Essas características evitam o deslocamento do curativo e garantem mobilidade aos movimentos do corpo.
- **Prata presente no curativo:** A prata iônica incorporada no curativo mata microrganismos patogênicos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos. O próprio curativo atua como uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida.

Recomendações de Uso

Sob a supervisão de um profissional da saúde, AQUACEL AG SURGICAL pode ser utilizado para o tratamento de:

- Indicado para feridas que cicatrizam em primeira intenção como: feridas/incisões traumáticas e pós-operatórias eletivas.

MODO DE USO

1. Antes de aplicar o curativo, limpe a ferida/incisão com um agente de limpeza de feridas adequado, enxague bem com soro fisiológico e seque a pele circundante.
 2. Escolha um curativo de tamanho adequado para assegurar o contato direto da ferida/incisão com a almofada de Hidrofibra.
 3. Retire o curativo da embalagem esterilizada.
 4. Retire inicialmente 3/4 do papel protetor ao longo do comprimento do curativo, minimizando o contato dos dedos com a almofada central e a superfície adesiva. Coloque o curativo de um dos lados da ferida/linha de incisão e aplique-o suavemente sobre a ferida/linha de incisão, moldando-o no lugar.
 5. Retire o restante 1/4 do papel protetor e molde cuidadosamente o curativo no lugar para uma aderência segura. Não estique o curativo.
 6. A superfície externa translúcida do hidrocolóide permite ao clínico monitorar a almofada central de Hidrofibra e avaliar quando o curativo precisa ser trocado. O curativo pode ser utilizado até 7 dias, sujeito a avaliação clínica regular e ao protocolo local de utilização de curativos.
 7. Todas as feridas/incisões devem ser monitoradas frequentemente. Retire AQUACEL AG SURGICAL quando clinicamente indicado (ex: vazamento, hemorragia excessiva, suspeita de infecção ou ao 7º dia).
- Para aplicar em incisões no joelho, a perna deve estar dobrada com um ângulo aproximado de 30º graus para uma melhor aplicação do curativo.

REMOÇÃO DO CURATIVO

1. Para remover o curativo, pressione a pele com uma mão e cuidadosamente levante a ponta do curativo com a outra mão.
2. Estique o curativo para que desgrude da pele e remova-o.

AQUACEL® Ag Surgical

Curativo para cobertura cirúrgica de hidrofibra com prata

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.

- Deve ser usado sob a supervisão de um profissional da saúde.
- O curativo não deve ser recortado.
- O curativo pode permanecer até 7 dias, mas deve ser monitorado para verificação da saturação.
- AQUACEL AG SURGICAL não deve ser utilizado em indivíduos sensíveis ao curativo ou a algum dos seus componentes ou que tenham tido alguma reação alérgica ao curativo ou a algum dos seus componentes.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Radiação gama	Registro ANVISA: 80523020019	3 anos	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
				Tamanho Geral	Tamanho da Janela Central	
412009	1257861	768455111169	269854	9 x 10 cm	3 x 4 cm	10
412010	1257758	768455111190	265794	9 x 15 cm	3 x 9 cm	10
412011	1257756	768455111220	269852	9 x 25 cm	3 x 17 cm	10
412012	1257943	768455111251	269853	9 x 35 cm	3 x 27 cm	10



Fabricante Legal:
ConvaTec Inc. – Estados Unidos



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT- AWC04
V.5

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.