



Luva para Procedimentos Não Cirúrgico Powder Free Descarpack

DESCRIÇÃO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Powder Free Descarpack** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI), não estéreis, sem pó e de uso único.

Promovem a proteção de profissionais de saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira mecânica, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Powder Free Descarpack** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A).

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330669117
C.A: 30.265
Fabricante: Careglove Global SDN. BHD.

INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Powder Free Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não invasivos.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos Powder Free Descarpack** estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Luva:** 100% borracha de látex natural;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
P	0122201	100 unidades	20 cartuchos
M	0122301	100 unidades	20 cartuchos
G	0122401	100 unidades	20 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
- ❖ Lavar, secar as mãos e proceder com a antisepsia das mesmas;
- ❖ Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- ❖ Calçar as luvas;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Higienizar as mãos;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.