

Cutimed® Siltec® B

Espuma de silicone com borda



Descrição:

Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, tiras superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. Composto por camada de contato em silicone perfurado e bordas de 2cm com efeito memória, pois retorna ao seu formato original mesmo após necessidade de reposicionamento ou dobras indesejadas nas bordas. Adesivo protegido por filme de polietileno. Produto estéril a óxido de etileno. O produto pode ser recortado se necessário. Livre de látex.

Indicações:

O Cutimed® Siltec® B é indicado para o gerenciamento de feridas com exsudato, tais como: úlceras arteriais e venosas, lesão por pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos cutâneos e áreas doadoras. Pode ser recortado, lembrando que se o recorte for ao meio, ficará sem a borda em um dos lados.

Advertências e Precauções:

Cutimed® Siltec® B encontra-se embalado para utilização única. Não reutilize nem volte a esterilizar, para evitar o risco de transmissão de fluidos corporais ou tecido contaminado entre pacientes. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Elimine material aberto ou não utilizado da própria embalagem. Verifique se a ferida apresenta sinais de infecção e trate-a de acordo com as práticas clínicas. Exclusivamente para uso externo.

Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.

Remova o curativo antes de uma sessão de radioterapia.

Contraindicações:

Não utilize em pacientes com uma sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto.

Cutimed®

Composição do produto:

- Filme protetor do adesivo de polietileno
- Silicone perfurado com adesivo
- Espuma de poliuretano
- Tiras termosseladas
- Borda de silicone perfurado
- Filme de poliuretano

Características	Benefícios
Curativo autoadesivo de silicone perfurado	Adesivo suave e seguro
Borda de fixação de silicone suave	2 cm de bordas com efeito memória com boa adesividade atraumática
Camada de contato com a ferida de silicone suave perfurado	Silicone perfurado para a passagem do exsudato mais viscoso
Espuma de poliuretano com tiras absorventes termosseladas	Absorção e retenção do exsudato
Filme de poliuretano com marca impressa	Película protetora na parte superior do produto, impermeável à água, fluidos corporais e microrganismos patogênicos, e permeável à troca gasosa

Modo de Uso:

- 1- Limpe a ferida de acordo com as boas práticas clínicas.
- 2- Certifique-se de que a área da pele circundante está seca.
- 3- Escolha o curativo do tamanho adequado, que cubra a pele íntegra ou a ferida e se sobreponha aos limites.
- 4- Abra a embalagem e retire o curativo. Certifique-se de que esteja esterilizado.
- 5- Remova a película de proteção e aplique-a com o lado do silicone adesivo voltado para a pele íntegra ou ferida.
- 6- Evite esticar o curativo.
- 7- Aplique a fixação adicional do curativo.
- 8- Se necessário, pode ser utilizado em combinação com outros curativos, por ex., Cutimed® Sorbact (em caso de feridas infectadas) ou Cutimed Gel (para feridas secas e necróticas).
- 9- Cutimed® Siltec® pode ser utilizado numa ferida infectada para além de terapia antimicrobiana, sob supervisão médica.
- 10- Cutimed® Siltec® pode permanecer no local da ferida durante, no máximo, sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exsudato. Recomenda-se que, inicialmente, o curativo seja trocado a cada 24 horas e, posteriormente, seja trocado cada vez com menos frequência, conforme necessário.
- 11- Remova cuidadosamente da ferida a fixação do curativo e o Cutimed® Siltec®, eliminando-os.
- 12- Se necessário, limpe a ferida antes de aplicar um novo curativo.

Esterilidade: Estéril por Óxido de Etileno

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Cutimed® Siltec® B deve ser armazenado em ambiente seco. Não exponha diretamente à luz do sol.

Fabricação: BSN Medical – Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000155

Validade do Registro: 02/01/2028

NCM: 30.05.9090

	Código NART	Código Simpro	Código Brasíndic	Apresentação	Quantidade
	73284-00	298705	73284-00	7,5cm X 7,5cm	Caixa com 10 unidades
	73284-05	298706	73284-05	10cm X 10cm	Caixa com 10 unidades
	73284-06	298711	73284-06	10cm X 22,5cm	Caixa com 10 unidades
	73284-01	298707	73284-01	12,5cm X 12,5cm	Caixa com 10 unidades
	73284-02	298708	73284-02	15cm X 15cm	Caixa com 10 unidades
	73284-03	298709	73284-03	17,5cm X 17,5cm	Caixa com 05 unidades
	73284-04	298710	73284-04	22,5cm X 22,5cm	Caixa com 05 unidades

Profundidade da Ferida

-  Superficial
-  Cavitária
-  Superficial + Cavitária

Nível do Exsudato

-  Seco a baixo
-  Baixo a moderado
-  Moderado a alto
-  Alto a excessivo

Tipo de Tecido

-  Necrótico
-  Esfacelos (liquefação)
-  Infecção
-  Granulação
-  Epitelização