

## PrimeClear SOLUÇÃO PRÉ-LIMPEZA

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL  
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO  
USO RESTRITO ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL  
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

### INDICAÇÃO:

DETERGENTE PRÉ-LIMPEZA. O Primeclear é uma eficiente solução a base de tensoativos, utilizada no processo de pré-limpeza, para evitar a formação de incrustações e a aderência de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico-hospitares, odontológicos e laboratoriais.

### COMPOSIÇÃO:

Veículo, tensoativos não iônicos, umectante, acidificante, conservante e sequestrante.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Pronto uso, NÃO REQUER DILUIÇÃO. Agitar antes de usar. Aplicar o produto diretamente nos artigos contaminados interna e externamente imediatamente após o uso, deixando-os em contato com a solução, até que possa ser processada a limpeza completa. Havendo necessidade, aplicar mais PrimeClear para manter os instrumentais úmidos. Enxaguar os artigos em água corrente antes da limpeza. Observar recomendações do fabricante do equipamento. Temperatura de uso: é utilizado em temperatura ambiente. Mantém o material úmido agindo por um prazo de 12 horas. Ação bacteriostática.

### ADVERTÊNCIAS:

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha o produto fechado e ao abrigo da luz solar direta e do calor excessivo.

PRECAUÇÕES: Não ingerir. Evite contato prolongado com a pele. Evite inalação ou aspiração, contato direto com os olhos e mucosas. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

### RESTRIÇÕES DE USO:

Não se aplica.

### PRECAUÇÕES:

Não ingerir. Evite contato prolongado com a pele. Evite inalação ou aspiração, contato direto com os olhos e mucosas. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

## PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remover a pessoa para local arejado.  
Centro de Intoxicações – Disque intoxicação: 0800 722 6001

## LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: Verificar embalagem  
Validade: 24 meses.

## APRESENTAÇÕES:

750mL SPRAY - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;  
1L SPRAY - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;  
5L - 4 GALÕES DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;

*\*Algumas apresentações, venda sob consulta.*

## CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

ASPECTO: Líquido  
COR: Levemente transparente  
ODOR: Característico sem fragrância

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

PH: 6,00 a 9,00  
DENSIDADE (g/cm<sup>3</sup>): 0,990 a 1,100

## PRODUTO NOTIFICADO ANVISA/MS:

AFE nº 3.02637-0  
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS: 25351.542696/2014-00



EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA  
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO