

Catálogo de Modelos

Classe: DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em 02/07/2020 14:03:09

Pág. 1/1

Modelo

**60002 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL
LUBRIFICADO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO (P)
EMBALAGEM INDIVIDUAL CX/200**

Características

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

COMPOSIÇÃO

Espéculo: Poliestireno (PS) e Polietileno (PE) e Lubrificante - polidimetilsiloxano (silicone).

DESCARTE: Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

PRODUTO ESTERILIZADO POR: RADIAÇÃO IONIZANTE OU ÓXIDO DE ETILENO.

Registro(s) MS: 10379860197



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479