

Catálogo de Modelos

Classe: DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em 02/07/2020 14:04:05

Pág. 1/1

Modelo

Características

**40002 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTÉRIL
TAMANHO MEDIO (M) EMBALAGEM INDIVIDUAL
CX/200**

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

COMPOSIÇÃO- Poliestireno (PS) e Polietileno (PE)

Lote/Partida: vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

DESCARTE: Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE OU ÓXIDO DE ETILENO.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.
DESCARTAR APÓS O USO.

Registro(s) MS: 10379860106



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479