

Catálogo de Modelos

Classe: DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em02/07/2020 14:04:30

Pág. 1/1

30001 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAMANHO PEQUENO (P) EMBALAGEM INDIVIDUAL CX/200



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479

Características

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

COMPOSIÇÃO- Poliestireno (PS) e Polietileno (PE)

Lote/Partida: vide embalagem Fabricação: vide embalagem Validade: vide embalagem

DESCARTE: Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade. Utilizar luvas de procedimento.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
- 2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
- 3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
- 4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

Registro(s) MS: 10379860105

