



Dosador Oral Descarpac

DESCRIÇÃO

O **Dosador Oral Descarpac** é destinado para administração de medicamentos ou soluções por via oral, sendo um produto não estéril.

Este produto não possui conector tipo luer, evitando a conexão com dispositivos intravenosos. O bico dos dosadores possui ainda com uma tampa para evitar vazamentos. Juntamente com o produto, são disponibilizados alguns adaptadores, para frascos que não o possuem.

O **Dosador Oral Descarpac** permite a preparação prévia do medicamento para uso posterior evitando desperdícios, fornece uma dosagem mais precisa, além de etiquetas adesivas de identificação para maior segurança do paciente.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660257

Fabricante: Jiaying Jiu Hai Medical Technology Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

O **Dosador Oral Descarpac** é recomendado para administração de medicamentos e soluções de pequenos volumes por via oral.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Dosador Oral Descarpack** é disponível em quatro diferentes tamanhos, sendo estes: 3 mL, 5 mL, 10 mL e 20 mL.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Seringa Dosadora:** Polipropileno (PP);
- ❖ **Êmbolo:** Polipropileno (PP);
- ❖ **Tampa de Proteção:** Polipropileno (PP);
- ❖ **Adaptador:** Policloreto de Vinila (PVC).

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. por Pacote	Qtde. Caixa Master
3 mL	0710201	150 unidades	3600 unidades
5 mL	0710301	100 unidades	2400 unidades
10 mL	0710401	80 unidades	1920 unidades
20 mL	0710501	40 unidades	960 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Avaliar a condição da embalagem e prazo de validade antes da utilização;
- ❖ Quando necessário, encaixar o adaptador no bocal do frasco para facilitar a sucção da solução e/ou medicamento;
- ❖ Inserir o **Dosador Oral Descarpack** no adaptador;
- ❖ Virar o frasco e aspirar a quantidade desejada;
- ❖ Tampar o **Dosador Oral Descarpack**;
- ❖ Identificar o dosador com as etiquetas adesivas disponíveis na embalagem;
- ❖ Injetar lentamente na boca do paciente com a cabeça ligeiramente levantada.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- ❖ Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada;

- ❖ Uso exclusivo para administração de medicamentos por via oral;
- ❖ Este produto não é indicado para administração de soluções intravenosas ou intramusculares;
- ❖ Utilizar a etiqueta adesiva para identificação do paciente e do medicamento, evitando erros de administração;
- ❖ Não utilizar o mesmo dosador para mais de um paciente;
- ❖ Lavar o dosador em água corrente para uma segunda utilização, com o mesmo frasco de medicamento e com o mesmo paciente;
- ❖ Não reutilizar o dosador caso os frascos de medicamentos sejam compartilhados por outros pacientes.
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.