



Bolsa Coletora de Urina Especial Descarpack

DESCRIÇÃO

A **Bolsa Coletora de Urina Especial Descarpack** é destinada para a drenagem de urina em pacientes portadores de incontinência urinária ou com dificuldade de micção espontânea. A Bolsa é ligada através do conector universal a uma sonda de Foley ou Nelaton que é introduzida no canal uretral do paciente.

A **Bolsa Coletora de Urina Especial Descarpack** possui capacidade para armazenamento de até 2000 mL, válvula anti-refluxo (que impede o retorno de urina, oferecendo proteção adicional) e clamp corta fluxo.

Apresenta ainda suporte de fixação tipo cabide, para ser colocada na lateral cama ou em cadeira de rodas, e gancho para transporte, facilitando a locomoção dos pacientes.

Produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660253

Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

A **Bolsa Coletora de Urina Especial Descarpack** é destinada para armazenamento, drenagem e monitoramento do volume urinário de pacientes em unidades de saúde, hospitais e clínicas. São utilizadas em conjunto com uma sonda de Foley ou Nelaton em pacientes com retenção/incapacidade ou incontinência urinária.

A **Bolsa Coletora de Urina Especial Descarpack** pode ser fixada na lateral da cama ou em cadeira de rodas, para sua correta utilização, deve ser mantida abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Bolsa Coletora:** PVC;
- ❖ **Tubo Extensor:** PVC;
- ❖ **Clamp Corta Fluxo:** Polietileno;
- ❖ **Tampa Protetora do Conector:** Polietileno;
- ❖ **Tubo de Drenagem:** PVC;
- ❖ **Conector Universal:** PVC;
- ❖ **Válvula Antirrefluxo:** PVC;
- ❖ **Válvula de Drenagem:** Polietileno;
- ❖ **Suporte de Fixação tipo Cabide:** Polietileno de alta densidade;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. Pacote	Qtde.Caixa Máster
2000 mL	0490201	5 unidades	32 pacotes

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Inspecionar visualmente o produto quanto à integridade da embalagem e validade;
- ❖ Fechar o clamp do tubo extensor e o tubo de saída;
- ❖ Retirar a tampa protetora do conector universal do tubo extensor da Bolsa Coletora de Urina e conectar no terminal da sonda de Foley ou Nelaton, previamente preparada;
- ❖ Posicionar a tubulação para assegurar um fluxo sem obstáculos;
- ❖ Abrir o clamp do tubo extensor;

- ❖ Pendurar a Bolsa Coletora, através do seu suporte de fixação tipo cabide, no suporte da cama;
- ❖ A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente;
- ❖ Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, um profissional habilitado deverá abrir a válvula do tubo de drenagem para descartar o conteúdo;

Nota: Se uma coluna móvel de urina for observada, checar quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a obstrução física.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções de uso;
- ❖ Produto esterilizado com óxido de Etileno;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Não utilizar se a embalagem estiver violada ou fora da data de validade;
- ❖ Atóxico e apirogênico;
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.