


FICHA TÉCNICA



SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

CARACTERÍSTICAS

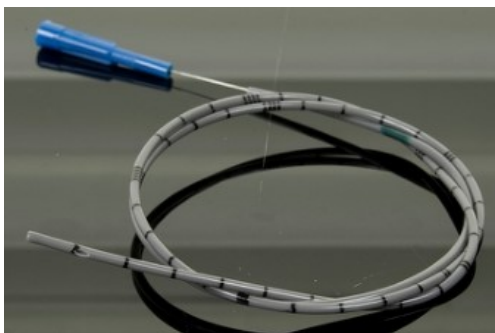

- Cateter ureteral, em poliuretano, com extremidade flexível, radiopaco, graduada de cm em cm aproximadamente 70 cms.
- Mandril (fio guia), em aço inoxidável
- Adaptador Luer-Lock, em PVC

Acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.




Ponta fechada com 01 furo lateral



Ponta aberta

EMBALAGENS

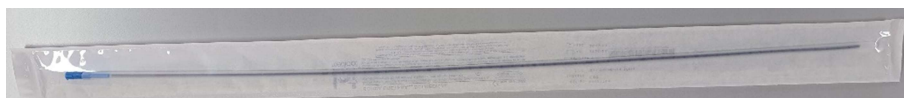

Unitária - 820mm x 60mm



Caixa com 05unds - 60mm X 910mm x 100mm



Caixa embarque: 30unds - 930mm X 210mm X 140mm

FICHA TÉCNICA



SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

COMPOSIÇÃO

Cateter ureteral: Poliuretano
Mandril (fio guia): Aço inoxidável
Adaptador Luer-Lock: PVC
Isento de látex
Isento de ftalato (DEPH)

MEDIDAS E CALIBRES

CATETER URETERAL						
Código	Nome	Ch	Comprimento	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Espessura da parede unilateral
94620304	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 3,0	696mm - 700mm	0,40	1,00	0,30mm
94620404	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 4,0	696mm - 700mm	0,60	1,35	0,38mm
94620504	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 5,0	696mm - 700mm	0,90	1,65	0,38mm
94620604	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 6,0	696mm - 700mm	1,00	2,00	0,50mm
94620704	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 7,0	696mm - 700mm	1,30	2,35	0,53mm
94620804	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 8,0	696mm - 700mm	1,60	2,65	0,53mm
94720304	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 3,0	696mm - 700mm	0,40	1,00	0,30mm
94720404	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 4,0	696mm - 700mm	0,60	1,35	0,38mm
94720504	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 5,0	696mm - 700mm	0,90	1,65	0,38mm
94720604	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 6,0	696mm - 700mm	1,00	2,00	0,50mm

GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL					
Código	Nome	Para Ch	Comprimento	D.E. (")	D.E. (mm)
94620304	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 3,0	709mm - 713mm	0,0120	0,30
94620404	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 4,0	709mm - 713mm	0,0120	0,30
94620504	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 5,0	709mm - 713mm	0,0160	0,40
94620604	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 6,0	709mm - 713mm	0,0197	0,50
94620704	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 7,0	709mm - 713mm	0,0197	0,50
94620804	SONDA URETERAL P.CIL.1FURO LATERAL	Ch 8,0	709mm - 713mm	0,0197	0,50
94720304	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 3,0	709mm - 713mm	0,0120	0,30
94720404	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 4,0	709mm - 713mm	0,0120	0,30
94720504	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 5,0	709mm - 713mm	0,0160	0,40
94720604	SONDA URETERAL CINZA P.ABERTA	Ch 6,0	709mm - 713mm	0,0197	0,50

FICHA TÉCNICA



SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

Trata-se de cateter para pielografia (também conhecida como urografia retrógrada) utilizado para drenagem de urina na realização do exame. É um exame radiológico que, por meio de imagens, analisa o sistema urinário.

A realização deste exame é comum em casos de disfunção renal ou obstrução das vias ureterais.

Para a realização do exame, o cateter ureteral para pielografia é introduzido em um ou ambos os ureteres e cada ponta desse elemento deve ser alinhada com a pelve renal do paciente.

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTOS

Produto esterilizado por Óxido de Etileno. A embalagem deve ser protegida contra os riscos de violação. Manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Destruir após o uso.

Este procedimento só deve ser efetuado por médicos especialistas que devem seguir os procedimentos técnicos padrões corretos, minimizando riscos de uma utilização incorreta.

Recomenda-se na utilização do produto a escolha pelo médico da apresentação mais adequada e indicada em cada caso em particular, conforme a necessidade de cada paciente.

A manipulação errada pode comprometer seriamente o cateter. Devem ser evitadas as angulações e dobras na sonda.

Caso haja incrustações a sonda deve ser removida, porque pode ser prejudicial à drenagem, devendo ser substituída. A colocação ou retirada da sonda nunca deve ser forçada. Havendo resistência, deve ser removida ou introduzida cuidadosamente.

Todos estes procedimentos devem ser executados baseados nas condições individuais de cada paciente.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Esse procedimento deverá ser executado em condições estéreis controladas.

A sonda vem pronta para sua utilização, desde que sua embalagem esteja intacta, mantendo a integridade da esterilização.

Deve ser retirada da sua embalagem no momento mais próximo possível de sua utilização, iniciando sua introdução após promover seu total estiramento, de forma cuidadosa, de acordo com os procedimentos adequados.

ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

O cateter ureteral é fornecido estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

FICHA TÉCNICA



SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

FABRICANTE

Electroplast S/A
Servando Gomez, n°2450 Montevideo - Uruguai

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

Badeia Comércio e Importação Ltda
Rua do Hipódromo, 1465/1473
CEP: 03162-020 – São Paulo - SP
Fone: (11) 2662-0890 – (11) 2292.0474
Fax: (11) 2292-2053
E-mail: badeia@badeia.com.br
Site: www.badeia.com.br

Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

Registro ANVISA: 10297020025