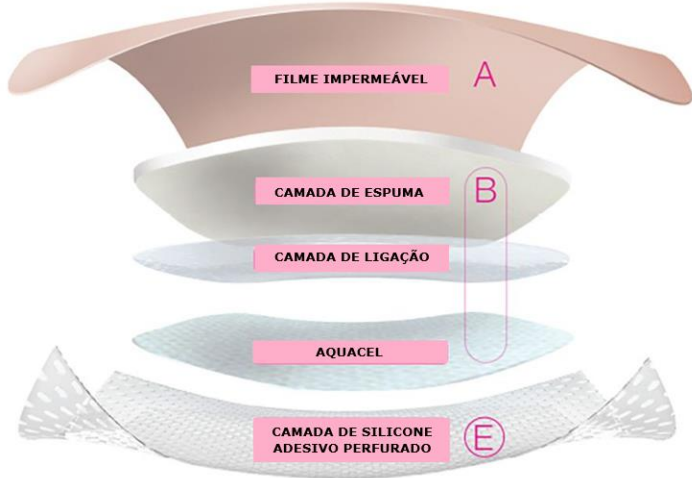


FICHA TÉCNICA
AQUACEL® Foam Pro

Nome Genérico	Curativo adesivo de espuma e hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica
Nome Comercial	Aquacel® FOAM Pro Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber®
Imagem	
Descrição	AQUACEL® Foam Pro - Curativo Adesivo de Espuma e Tecnologia Hydrofiber® é um curativo estéril, de espuma e Tecnologia Hydrofiber® para feridas, constituído por um filme externo impermeável de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com silicone adesivo perfurado. A almofada multicamadas absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma camada não tecido de Hydrofiber® (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone adesivo perfurado de contato com a ferida.
Marca	Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Composição do Produto	Filme de Poliuretano: camada de adesivo acrílico impermeável (Isopropanol, Acetato de etila, Heptano e Tolueno); Espuma: espuma de poliuretano absorvente; Camada de poliuretano aromático termoplástico: liga a espuma e a camada de Hydrofiber®; Hidrofibra: fibras de 100% carboximetilcelulose sódica; Silicone: silicone adesivo perfurado (composto por 100% silicone) coberto por filme de poliuretano com adesivo acrílico; Processo de esterilização: óxido de Etileno.
Características e Ações do Produto	- Tecnologia Hydrofiber®: forma um gel macio e coeso que se molda intimamente à superfície da ferida, mantém um ambiente úmido no leito da ferida (auxiliando no processo de cicatrização do organismo) e ajuda na remoção do tecido necrótico (desbridamento autolítico) sem traumatizar o leito da ferida. - Camada externa de filme de poliuretano: fornece uma barreira impermeável a vírus e bactérias que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo. - Camada de contato: o silicone adesivo perfurado permite uma remoção atraumática do curativo.

	 A. Camada externa de filme de poliuretano impermeável. B. Almofada multicamadas absorvente (camada de poliuretano, camada de ligação e camada de Hydrofiber® - Aquacel®). E. Camada de silicone adesivo perfurado.
Recomendações de Uso	Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções. O curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser utilizado em: - Abrasões - Lacerações - Cortes mínimos Sob a supervisão de um profissional da saúde, curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser usado no tratamento de feridas crônicas e agudas, tais como: • Úlceras de perna, lesão por pressão (estágio 2 - 4) e úlceras diabéticas; • Feridas cirúrgicas (pós-operatórias, áreas doadoras, dermatológicas); • Queimaduras de profundidade parcial (segundo grau); • Feridas cirúrgicas ou traumáticas deixadas para cicatrizar por segunda intenção, tais como incisões cirúrgicas deiscuentes; • Feridas cirúrgicas que cicatrizam por primeira intenção, tais como incisões cirúrgicas e dermatológicas (ex.: ortopédica e vascular); • Tratamento local de feridas que sangram facilmente, tais como feridas que passaram por desbridamento mecânico ou cirúrgico e áreas doadoras. • Curativo Aquacel® FOAM Pro pode ser incluído em um protocolo de prevenção e proteção contra lesões na pele.
Cuidados de Conservação	Armazenar em temperatura entre 10 e 25°C. Proteger da luz. Manter em local seco.
Prazo de Validade	5 anos
Registro Sanitário	Registro ANVISA Nº 80523020068
Responsável Técnico	Rejane Vasques Biembengutt - CRBM nº 9150

Código ICC	SIMPRO	Tamanho	Tamanho da Janela Central	Unidades por Caixa
421579	0307017	20 cm X 16,9 cm	11,4 cm X 13,5 cm	5
421580	0307018	24 cm X 21,5 cm	16,4 cm X 13,8 cm	5