

Nome técnico:	Agulhas para acupuntura			Part Number:	UM-002015	Validade:	05 anos
Código do Produto:	005029		Marca/Submarca:		UNIQMED	NCM:	9018.31.19
Código de Barras:	0606529509422		Método de Esterilização:		Óxido de Etileno		
Apresentação:	Caixa com 100 unidades – Blister individual com tubo guia						
Modelo:	0,20x15mm						
ANVISA/MS:	10098710064		Classe de Risco:	II	Validade do Registro:	Vigente	
Fabricante:	WUXI JIAJIAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.						
Origem:	China						

Indicação:

As Agulhas para Acupuntura Uniqmed são indicadas para realização de acupuntura por profissionais habilitados.

Instruções de Uso:

1. Lave e seque as mãos;
2. Abra o blister assepticamente e remova a agulha;
3. Com uma mão, segure a agulha;
4. Posicione a outra mão no mandril e segure no local a ser inserido;
5. Manipule a agulha de acupuntura e deixe-a no local por tempo apropriado;
6. Retire a agulha de acupuntura;
7. Imediatamente após o uso descarte a agulha em local apropriado.

Composição:

Agulha: Aço Inoxidável 304

Tubo guia/Mandril: Polipropileno

Armazenamento e Conservação:

Conservar em ambiente limpo, seco e bem ventilado. Não deve ser misturado com material virulento, perigoso ou corrosivo. Não expor à luz solar direta. Armazenar em temperatura ambiente, longe de substâncias químicas.

Precauções:

- Produto para uso profissional;
- Não utilizar se a embalagem individual estiver violada ou danificada;
- Fabricante recomenda uso único;
- Descartar em recipiente apropriado para perfuro cortantes conforme legislação vigente.

Imagem do Produto:

