

AGULHAS PARA ACUPUNTURA 0,25X50MM

Nome Técnico:	Agulhas para acupuntura		Part Number:		UM-002550	Validade	05	anos	
Código do Produto:	005371	Marca /	Marca / Submarca:		UNIQMED	NCM:	9018.31.19		
Código de Barras:	0602883973725	Método	Método de Esterilização:		Óxido de Etileno				
Apresentação:	Caixa com 100 unidades – Blister individual com tubo guia								
Modelo:	0,25x50mm								
ANVISA/MS:	10098710064	Classe de	Risco:		Validade do Registro:		igente		
Fabricante:	WUXI JIAJIAN MEDICAL I	WUXI JIAJIAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.							
Origem:	China								

Indicação:

As Agulhas para Acupuntura Uniqmed são indicadas para realização de acupuntura por profissionais habilitados.

Instruções de Uso:

- 1. Lave e seque as mãos;
- 2. Abra o blister assepticamente e remova a agulha;
- 3. Com uma mão, segure a agulha;
- 4. Posicione a outra mão no mandril e segure no local a ser inserido;
- 5. Manipule a agulha de acupuntura e deixe-a no local por tempo apropriado;
- 6. Retire a agulha de acupuntura;
- 7. Imediatamente após o uso descarte a agulha em local apropriado.

Composição:

Agulha: Aço Inoxidável 304 Tubo guia/Mandril: Polipropileno

Armazenamento e Conservação:

Conservar em ambiente limpo, seco e bem ventilado. Não deve ser misturado com material virulento, perigoso ou corrosivo. Não expor à luz solar direta. Armazenar em temperatura ambiente, longe de substâncias químicas.

Precauções:

- Produto para uso profissional;
- Nao utilizar se a embalagem individual estiver violada ou danificada;
- Fabricante recomenda uso único;
- Descartar em recipiente apropriado para perfuro cortantes conforme legislação vigente.



AGULHAS PARA ACUPUNTURA 0,25X50MM

Imagem do Produto:

