

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 04/12/2007	
	Título: CURATEC BOTA DE UNNA	DIP número: SEQUA FT-13	
		Revisão: 42	Pág. 1 / 3

Registro na ANVISA nº: 80246910003

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Curatec Bota de Unna consiste em uma bandagem inelástica de algodão misto impregnada com pasta à base de óxido de zinco.

2. INDICAÇÕES: Curatec Bota de Unna é indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores.

2.1. CONTRAINDICAÇÕES:


O produto é contraindicado para úlceras arteriais e úlceras mistas (comprometimento venoso e arterial). Não utilizar em caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos componentes do produto. Em caso de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspender o uso imediato do produto e procurar orientação médica.

3. MODO DE USO: a bandagem pode ser mantida intacta por até sete dias, a menos que haja desconforto, vazamento de exsudato, sinais clínicos de infecção, dormência e latejamento dos dedos ou em caso de quaisquer outras irritações locais.


Fazer repouso com os membros inferiores elevados imediatamente antes da aplicação do **Curatec Bota de Unna**, até a regressão do edema.

Realizar a limpeza da ferida de acordo com a prática rotineira, enxaguar bem e secar a pele adjacente antes da aplicação da bandagem. Em seguida, proceder ao enfaixamento conforme instruções a seguir:


3.1. Aplicação de Curatec Bota de Unna.

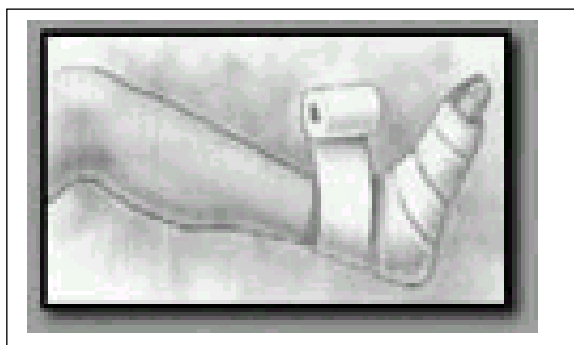

1. Iniciar a aplicação da bandagem pela base do pé, mantendo o pé e o calcanhar em ângulo reto. A bota deverá envolver a perna sem apertar e sem deixar abertura ou enrugamento.

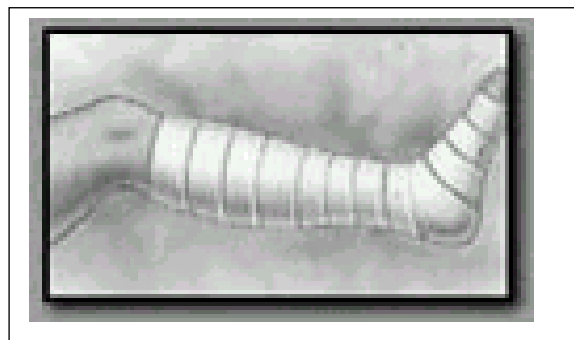

2. Aplicar a bandagem ao longo da perna até a altura do joelho.

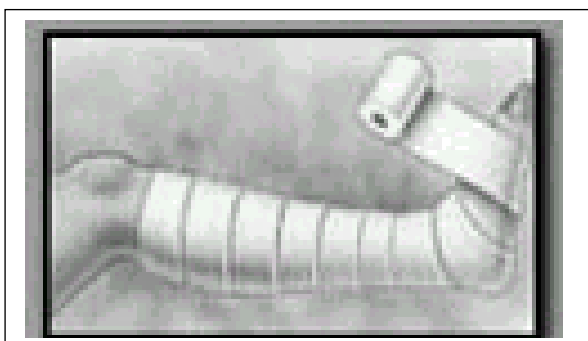

3. Aplicar uma bandagem elástica ou faixa de crepe para fixação da Bota. Manter a pressão uniforme recobrimo completamente o Curatec Bota de Unna.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 04/12/2007	
	Título: CURATEC BOTA DE UNNA	DIP número: SEQUA FT-13	
		Revisão: 42	Pág. 2 / 3

Para um melhor controle do exsudato, sugerimos:

4. Aplicar um curativo secundário, gaze estéril ou compressa cirúrgica no local da lesão para absorver a exsudação;
5. Colocar outra faixa de crepe para fixação do curativo absorvente;
6. Trocar o curativo absorvente e sua faixa de fixação sempre que sujos ou molhados.

3.2. Remoção de Curatec Bota de Unna.

Levantar a borda livre da bandagem desenrolando-a cuidadosamente ao longo da perna. Não é necessário cortar a bandagem para remoção.

4. Modelos Comerciais

Código	Modelos Comerciais	Código de Barras (unitário)	Código de Barras (múltiplo)
BK226076	Curatec Bota de Unna 7,5 cm x 6 m	7898284483540	17898284483547
BK229076	Curatec Bota de Unna 7,6 cm x 9,14 m	7898284483137	17898284483134
BK227102	Curatec Bota de Unna 10,2 cm x 7 m	7898284483588	17898284483585
BK229102	Curatec Bota de Unna 10,2 cm x 9,14 m	7898284483144	17898284483141

4.1. Modelos Comerciais – conforme registro ANVISA

- 7,6 cm x 5 m;
- 7,5 cm x 6 m;
- 7,6 cm x 7 m;
- 7,6 cm x 9,14 m;
- 10,2 cm x 5 m;
- 10,2 cm x 6 m;
- 10,2 cm x 7 m;
- 10,2 cm x 9,14 m.

✓ As caixas de embarque possuem 5 unidades de Curatec Bota de Unna por caixa.

5. PRECAUÇÕES: em algumas situações não é aconselhável a utilização de Bota de Unna, como nos casos de celulite (inchaço e eritema na área da ferida) e processo inflamatório intenso, pois a compressão aumentará a dor no local; também não é aconselhável o uso em pacientes com diabetes mellitus, pois há risco de diminuição da perfusão sanguínea no membro acometido.

O Curatec Bota de Unna não pode ser cortado e aplicado sobre a lesão. Deve ser usado segundo a indicação do fabricante, sob orientação de um profissional da saúde.

6. COMPOSIÇÃO: Água purificada, Goma Acácia, Óleo de Rícino, Glicerina, Óxido de Zinco, Cera Autoemulsionante Não Iônica e Conservantes (mistura de de fenoxietanol e parabenos).

7. REQUISITOS ANALÍTICOS E LIMITES:

- CTBAV: Máx. 10 UFC/g
- Fungos e Leveduras: Máx. 10 UFC/g
- Aparência: bandagem impregnada com pasta de óxido de zinco, apresentando coloração branca e odor característico.
- Perfil de impregnação:
Mínimo de 14 g/m para as apresentações: 7,5 cm x 6,0 m e 7,6 cm x 9,14 m.
Mínimo de 22 g/m para as apresentações: 10,2 cm x 7,0 m e 10,2 cm x 9,14 m.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 04/12/2007	
	Título: CURATEC BOTA DE UNNA	DIP número: SEQUA FT-13	
		Revisão: 42	Pág. 3 / 3

8. PRAZO DE VALIDADE: dois anos, desde que, o produto seja armazenado nas condições indicadas na instrução de uso e a embalagem seja mantida intacta.

9. ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz e umidade.

ELABORAÇÃO: Nesser C. Oliveira	APROVAÇÃO:	ALTERAÇÃO:
Aprovação inicial: Nesser C. Oliveira	Giselle Coelho	Ana Elisa Souza
Emissão: Ana Elisa Souza	Data da publicação: 30/06/2022	Data: 03/06/2022

CÓPIA NÃO CONTROLADA