

	Espécie: FICHA TÉCNICA		Data Instituição: 01/07/2014	
	Título: CURATEC HIDROCOLÓIDE		DIP número: SEQUA FT- 17	
			Revisão: 25	Pág. 1 / 2

Registro na ANVISA nº 80246910002

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: *Curatec Hidrocolóide* é composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Quando em contato com o exsudato da ferida há a formação de um gel que promove o desenvolvimento de um ambiente úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. *Curatec Hidrocolóide* permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indica a necessidade de troca.

2. INDICAÇÕES: pode ser utilizado como curativo primário ou secundário, em feridas com leve à moderada exsudação, como dermoabrasões, escoriações, úlceras nos membros inferiores (venosas, arteriais e mistas), úlceras por pressão (tratamento e prevenção), queimaduras de 2º grau, áreas doadoras e feridas cirúrgicas. Em feridas superficiais, usá-lo como curativo primário. Em feridas profundas, preencher a cavidade com curativo apropriado e aplicar o hidrocolóide como curativo secundário.

2.1. Contraindicações: pacientes com conhecida sensibilidade à composição do produto.

3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Irrigar a lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9%;
- Remover o excesso de exsudato e tecidos desvitalizados, se necessário;
- Secar somente a região periferida;
- Escolher o tamanho e/ou apresentação de *Curatec Hidrocolóide* que melhor se adapte, excedendo a ferida em pelo menos, 3 cm;
- Colocar o curativo sobre a ferida, modelando e fixando-o;
- Pressionar levemente o curativo com as mãos para garantir uma maior durabilidade (conceito de adesivo por pressão);
- Descartar qualquer porção de curativo não utilizada;
- Poderá ser usado por até sete dias. Se houver extravasamento de exsudato e/ou gel, ou desprendimento das bordas, o curativo deverá ser trocado.

ATENÇÃO: o uso do curativo *Curatec Hidrocolóide* deve ser supervisionado por um profissional de saúde.

3.1. Troca do curativo e remoção:

- levantar uma extremidade do curativo e, delicadamente, removê-lo pressionando a pele adjacente para evitar traumas ao tecido. Caso seja observada qualquer dificuldade em remover o curativo, o uso de substâncias oleosas como AGE ou óleo mineral podem facilitar a remoção;
- limpar a ferida antes da aplicação de novo curativo;
- o período máximo de uso, se não houver descolamento ou extravasamento de exsudato, é de sete dias.

4. APRESENTAÇÕES:

- 6,0 cm x 6,0 cm – cartucho com 05 unidades.
- 10,0 cm x 10,0 cm – cartucho com 05 unidades.
- 15,0 cm x 15,0 cm – cartucho com 05 unidades.
- 15,0 cm x 18,0 cm (sacral) – cartucho com 05 unidades.
- 15,0 cm x 20,0 cm – cartucho com 05 unidades.
- 20,0 cm x 20,0 cm – cartucho com 05 unidades.

As caixas de embarque apresentam 6 cartuchos por caixa.

5. PRECAUÇÕES:

O uso de *Curatec Hidrocolóide* não é recomendado em queimaduras de 3º grau e em pacientes com histórico de reações alérgicas. Caso apareçam sinais de infecção, como odor característico, alteração na cor do exsudato, febre ou celulite (sensibilidade ao toque e eritema na área da ferida) deve-se procurar orientação médica.

É necessário ter cuidado com o curativo *Curatec Hidrocolóide* no momento de mudança de decúbito do paciente.

6. COMPOSIÇÃO:

Carboximetilcelulose sódica, poli-isobutileno, adesivo, conservante e filme de poliuretano.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 01/07/2014	
		DIP número: SEQUA FT- 17	
	Título: CURATEC HIDROCOLÓIDE	Revisão: 25	Pág. 2 / 2

7. REQUISITOS ANALÍTICOS E LIMITES:

<i>Testes Físico-Químicos pós-esterilização</i>	<i>Especificação</i>
MVTR Invertido (g/m ² /24h)	≥ 240
Capacidade de absorção (g/m ² /24h)	≥ 3500

8. PRAZO DE VALIDADE: o prazo de validade é de dois anos, desde que, armazenado nas condições indicadas e com a embalagem intacta.

9. ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

ELABORAÇÃO: Ramira Yuri Ribeiro	APROVAÇÃO:	ALTERAÇÃO:
Aprovação inicial: Nesser C. P. Oliveira	Giselle Coelho	Jaqueline Silva
Emissão: Ana Souza	Data da publicação: 24/05/2021	Data: 10/05/2021

CÓPIA NÃO CONTROLADA