

Registro na ANVISA nº 80246910043

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Curatec AGE Essencial é um produto extraído de óleos vegetais composto por Ácidos Graxos Essenciais – AGE (Ácidos capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, pentadecanóico, palmítico, palmitoléico, margárico, cis-10-heptadecenóico, esteárico, oleico, t-linoleico, linoleico, t-linolenico, araquídico, eicosenóico e behênico), contendo ainda Palmitato de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) que age na hidratação preventiva, além de possuir propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas.

2. INDICAÇÕES:

- aplicação em pele íntegra;
- prevenção de úlceras por pressão;
- feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção, de qualquer etiologia;
- feridas com perda de tecido superficial e parcial;
- dermatites perilesões;
- queimaduras de primeiro e segundo graus;
- dermatites amoniacais (assaduras de bebê);
- dermatites perigastrostomias, traqueostomias e drenos.

3. MODO DE USO:


- **3.1. PREVENÇÃO DE FERIDAS:** aplicar **Curatec AGE Essencial** nos locais desejados sempre que necessário.
- **3.2. TRATAMENTO DE FERIDAS:** irrigar a lesão com soro fisiológico 0,9%; secar a pele ao redor da ferida; aplicar o óleo diretamente sobre o leito da lesão ou umedecer coberturas estéreis e aplicar sobre a ferida; ocluir com uma cobertura secundária estéril; fixar conforme a necessidade do local da ferida.
- **3.3. INTERVALOS DE TROCA:** a frequência de reaplicação do produto dependerá da avaliação prévia do profissional. Sugere-se reaplicação diária para feridas muito exsudativas e a cada doze horas para feridas que apresentem o leito mais desidratado.

4. APRESENTAÇÕES:

- 20 mL: 12 unidades por caixa de embarque.
- 100 mL: 12 unidades por caixa de embarque.
- 200 mL: 12 unidades por caixa de embarque.
- **5. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** devido à absorção do óleo pelo leito da ferida, sugerimos que o curativo seja reaplicado depois de doze horas. Lavar as mãos antes e depois do procedimento. Utilizar técnica limpa ou asséptica para execução do procedimento (a escolha deve ser feita pelo profissional de acordo com características da lesão e do paciente). Não existem contraindicações ao uso desse produto, a menos que haja histórico de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação. Em caso de alergias ou hipersensibilidade, suspender o uso imediatamente e procurar orientação médica. Produto para uso externo, não deve ser ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não expor as partes em contato com o produto à luz solar. Suspender o uso quando o paciente for submetido a sessões de câmara hiperbárica, podendo restabelecer o uso no intervalo destas sessões.
- **6. COMPOSIÇÃO:** ácido capróico, ácido caprílico, ácido cáprico, ácido láurico, ácido mirístico, ácido pentadecanóico, ácido palmítico, ácido palmítoleico, ácido margárico, ácido cis-10-heptadecenóico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido t-linoleico, ácido linoleico, ácido t-linolenico, ácido linolenico, ácido araquídico, ácido eicosenóico, ácido behênico, palmitato de retinol (vitamina A) e acetato de tocoferol (vitamina E).

7. REOUISITOS ANALÍTICOS LIMITES:

• Aparência: mistura oleosa homogênea de coloração amarelo claro, livre de impurezas e fragmentos,

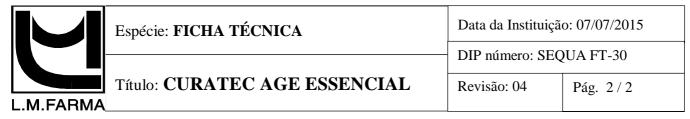

acondicionada em frascos dispostos em caixas sem avarias.

• Odor: característico de óleo vegetal.

• **Densidade:** 0,87 - 0,95g/mL.

8. PRAZO DE VALIDADE: dois anos, mantendo o produto armazenado à temperatura ambiente e com embalagem intacta. Essa não pode estar aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

9. ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz.

ELABORAÇÃO: Joyce S. C. Pires	APROVAÇÃO:	ALTERAÇÃO:
Aprovação inicial: Nesser C. P. Oliveira	Andreia Faria	Aldo Nunes
Emissão: Gerson Chamberlaim de Melo	Data da publicação: 09/09/2016	Data: 26/08/2016