

|                                                                                  |                                              |  |                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|
|  | Espécie: FICHA TÉCNICA                       |  | Data da Instituição: 09/08/2013 |            |
|                                                                                  | Título: CURATEC GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB |  | DIP número: SEQUA FT-04         |            |
|                                                                                  |                                              |  | Revisão: 28                     | Pág. 1 / 2 |

### Registro na ANVISA nº 80246910023

**1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* é um curativo de gaze tecida 100% algodão, de alta absorção, com trama larga, impregnado com PHMB (polihexametileno de biguanida) na concentração mínima de 0.2%, sendo um agente antimicrobiano que evita a contaminação do leito da ferida e combate infecções já instaladas. Possui um amplo espectro de ação contra micro-organismos Gram positivos e negativos, fungos e leveduras. Além disso, limita a contaminação cruzada de paciente para paciente, paciente para médico e paciente para o meio ambiente. *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* é um produto destinado ao tratamento de feridas infectadas ou para prevenir que uma ferida limpa fique infectada. Seu alto poder antimicrobiano combate as bactérias e, desse modo, favorece a evolução do processo cicatricial. Em contato com a ferida, o produto promove proteção efetiva contra contaminação microbiana. Suas tramas permitem trocas gasosas, contribuindo para a manutenção de um ambiente ideal para cicatrização.

**2. INDICAÇÕES:** É indicado que *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* seja utilizado sob a supervisão de um profissional da saúde. *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* é indicado na cobertura ou enfaixamento de feridas colonizadas e/ou infectadas e para prevenção da penetração de micro-organismos. Pode ser utilizado em conjunto com outra terapia que o médico prescreva.

**2.1. Contraindicações:** *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* é contraindicado a indivíduos que apresentem hipersensibilidade a alguns dos componentes da fórmula.

### 3. MODO DE USO E INTERVALO DE TROCA

#### 3.1. Modo de uso

- Limpar e irrigar bem o leito da lesão. Se necessário, fazer o desbridamento para remoção de tecidos inviáveis;
- Limpar a pele ao redor e secar bem;
- Escolher um tamanho do curativo que melhor se enquadre na ferida;
- Aplicar o produto preenchendo toda a extensão da ferida e/ou suas cavidades, de modo que o produto preencha totalmente a ferida;
- Ocluir com uma cobertura secundária estéril.

#### 3.2. Intervalo de trocas

Nos casos de feridas infeccionadas, *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB* poderá ser trocado a cada 24 horas. Já para os casos de feridas com alto risco de colonização, o produto poderá ser trocado a cada 72 horas. A frequência da troca dependerá da condição da ferida e das orientações de um profissional da saúde.

### 4. APRESENTAÇÕES

| Caixa         | 60 unid.        | 48 unid. | 48 unid. | 10 unid.        | 6 unid. |
|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------|
| Embalagem     | 5 unid.         | 10 unid. | 2 unid.  | 1 unid.         |         |
| Apresentações | 5 cm x 5 cm     |          |          |                 |         |
|               | 7,5 cm x 7,5 cm |          |          |                 |         |
|               | 10 cm x 10 cm   |          |          |                 |         |
|               | 10 cm x 12 cm   |          |          |                 |         |
|               | 10 cm x 15 cm   |          |          |                 |         |
|               | 15 cm x 17 cm   |          |          |                 |         |
|               | 15 cm x 30 cm   |          |          |                 |         |
|               |                 |          |          | 11,4 cm x 3,7 m |         |

### 5. PRECAUÇÕES:

- manter o produto fora do alcance de crianças;
- produto destinado apenas para uso externo;
- não utilizar caso a embalagem esteja danificada;
- caso haja piora na condição da ferida, consultar um médico imediatamente;
- um antibiótico sistêmico prescrito pelo médico pode ser utilizado em conjunto com *Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB*.

**6. COMPOSIÇÃO:** Curativo de gaze tecida 100% algodão impregnado com PHMB (polihexametileno de biguanida) na concentração mínima de 0.2%.

|                                                                                  |                                                     |                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Espécie: <b>FICHA TÉCNICA</b>                       | Data da Instituição: 09/08/2013 |                   |
|                                                                                  |                                                     | DIP número: SEQUA FT-04         |                   |
|                                                                                  | Título: <b>CURATEC GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB</b> | Revisão: 28                     | Pág. <b>2 / 2</b> |

**7. REQUISITOS ANALÍTICOS E LIMITES:** não aplicável

**8. ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE:** o produto deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade, mantendo-o na embalagem original e intacta. O prazo de validade de dois anos é válido seguindo essas condições.

**9. REFERÊNCIAS:** não aplicável.

|                                                 |                                |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>ELABORAÇÃO:</b> Estela Hanauer Schaab        | <b>APROVAÇÃO:</b>              | <b>ALTERAÇÃO:</b> |
| <b>Aprovação inicial:</b> Nesser C. P. Oliveira | Giselle Coelho                 | Samuel Trindade   |
| <b>Emissão:</b> Ana Elisa Souza                 | Data da publicação: 01/08/2022 | Data: 28/07/2022  |

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**