

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 1 de 2

COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL COM ELEMENTO RADIOPACO VALENTINNA PREMIUM

Nome Técnico: Compressas

Nome Comercial: Compressa Campo Operatório Não Estéril com Elemento Radiopaco Valentinna Premium

Cadastro na ANVISA: 81481900002



1- Descrição do Produto

- Tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com quatro camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), com dispositivo para fixação, na forma de alça livre, e acabamento em overlock. Apresenta-se não estéril e com elemento radiopaco que é um material inócuo, impregnado com no mínimo de 55% de sulfato de bário, firmemente fixado ao seu corpo.
- Confeccionados em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes;
- Embalados em embalagens plásticas;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

2- Apresentação do Produto

- Embalagem plástica com 50 unidades;
- Dimensões: 23 cm x 25 cm ou 45 cm x 50 cm;
- Peso: 8g ou 30g ou 35g.

3- Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa Campo Operatório Não Estéril com Elemento Radiopaco Valentinna Premium é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias e ainda como anteparo traumático de vísceras e tecidos.

4- Instrução de Uso

Retirar as compressas de campo operatório da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta.

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 2 de 2

5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar.

6- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Produto pronto para uso não sendo necessário lavá-lo. Como é um produto não estéril há a necessidade de esterilizá-lo, caso utilize-o como um produto estéril.
- A esterilização da Compressa Campo Operatório Não Estéril Valentinna Premium pode ser realizada utilizando os métodos de esterilização por óxido de etileno, raios gama ou autoclave a vapor.

CÓPIA CONTROLADA