

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A Versão: 02
	FICHA TÉCNICA	Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 1 de 2

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL EVA PREMIUM CAMADAS CONSOLIDADAS

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Cirúrgica Tripla Descartável Eva Premium – Camadas Consolidadas

Cadastro na ANVISA: 81481900012

1- Descrição do Produto

- Composta por três (03) camadas de tecido não tecido SMS (spunbond – meltblown – spunbond) sendo, uma camada externa, uma camada de filtro e uma camada interna. As três (03) camadas são consolidadas e produzidas de forma contínua;
- 100% polipropileno;
- Eficiência de Filtragem bacteriana (BFE): 98,91%;
- Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP): 98,00%;
- Com clipe nasal maleável de alumínio, para ajustar e manter o contorno do nariz e das bochechas;
- Gramatura: 40g/m²;
- Material para fixação: Elástico;
- Produto Não Estéril;
- Embaladas em embalagem de cartucho.

2- Apresentação do Produto

- Embalagem de cartucho com 50 unidades.

3- Indicação de Uso/Finalidade

Equipamento de proteção de uso único destinado a cobrir a boca e o nariz; indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profissional de saúde de agentes contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a passagem de sangue e outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional da saúde ou paciente.

4- Instrução de Uso

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:

- Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);
- Fazer a adequada higienização da mão com água e sabão ou com preparação alcoólica a 70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas);
- Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve-se executar imediatamente à higiene das mãos;
- Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;
- Manter o conforto e espaço para a respiração.

5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar.

6- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada;

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 2 de 2

- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso;
 - Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar;
 - A máscara deve ser utilizada corretamente, não devendo ser manipulada durante o uso;
 - Lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada;
 - A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;
 - Para removê-la, manuseie o elástico/tiras de fixação, não toque na parte frontal da máscara.
- Ao retirar a máscara higienize as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70%;
- Não compartilhe a sua máscara;
 - Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

CÓPIA CONTROLADA