

 PRODUTOS MÉDICOS LTDA	FICHA TÉCNICA SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO NOTIFICAÇÃO ANVISA: Nº10014160053	Nº19/21 Elaboração: 07/2021 Emissão: 07/2024 Entrada em vigor: 07/2024 Revisão: nº11

FINALIDADE

Utilizado em drenagem e coleta de fluidos corpóreos, em caso de hemotórax, pneumotórax, hidrotórax (pleural) e em cirurgia cardiovascular (mediastinal).

APRESENTAÇÃO

	Código	Capacidade Volumétrica	Graduação	Comprimento do tubo interno de PVC biselado	Conector	Tampa
	41013	250ml	10 ml	13,50 cm	042	2 Vias
	41015	250ml			0175	
	41004	500ml			042	
	41005	500ml	10 ml até 200ml 50 ml de 250 até 500ml	15,50 cm	040	2 e 3 Vias
	41000	500ml			0175	
	41001	1000ml			0175	
	41006	1000ml	50 ml	21,50 cm	040	
	41002	2000ml			0175	
	41003	2000ml		19,50 cm	040	
	41014	3500ml	100 ml	24,50 cm	040/0175	

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- ✓ Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno;
- ✓ Frasco / uma das vias da tampa é fixada a Extensão (c/1,20m), na outra via o Tubo (c/6,0cm) e possui Alça de sustentação (c/1,50m): Fabricados em cloreto de Polivinila (PVC) atóxico;
- ✓ Tampa com anel de vedação em EVA/ Conector: Fabricado em polietileno atóxico com duas ou três saídas, possui a opção de conector de 1/4 ou 3/8; (O frasco de graduação 250ml só é apresentado no modelo com duas vias);
- ✓ Tubo interno biselado: Fabricado em cloreto de Polivinila (PVC) atóxico;
- ✓ Pinça para estrangulamento/ Espiral: Fabricado em cloreto de Polivinila (PVC) atóxico;

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Abrir a embalagem assepticamente após a verificar a sua integridade e prazo de validade, antes da utilização do produto;
- ✓ Preparar o frasco coletor adicionando um volume de água estéril suficiente para imergir a extremidade inferior do tubo interno tampando o mesmo; (selo d'água).
- ✓ Posiciona-lo aproximadamente 70 cm abaixo do paciente com auxílio do cordão;
- ✓ Introduzir o Dreno no paciente, através de punção transcutânea ou de processo cirúrgico convencional;
- ✓ Fazer corte reto na extremidade do Dreno e posiciona-lo no conector do tubo coletor;
- ✓ Abrir a pinça do tubo e permitir drenagem gravitacional ou por sucção, conforme critério médico;
- ✓ Fechar a pinça do tubo anteriormente a sua troca ou remoção de fluidos;

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ Artigo médico hospitalar de uso único;
- ✓ Proibido reprocessar;
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Destruir após uso;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado;
- ✓ Nunca elevar o frasco ao nível do tórax ou da saída do dreno, utilizar o cordão para locomoção do paciente;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizado de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

- ✓ Armazenar e transportar em local limpo, livre de umidade ou contaminação e em temperatura ambiente.

Fabricante: CPL Medical's Produtos Médicos Ltda

CNPJ 43.512.870/0001-52 Indústria Brasileira

Rua Vieira Portuense, 760 - CEP 04347-080 - Jardim Oriental - São Paulo - SP

Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM-SP 3940

Tel: (11) 5015-1000 SAC (11) 5011-7263 (11) 93235-3355

cplmedicals@cplmedicals.com.br

www.cplmedicals.com.br

Indústria genuinamente nacional sinônimo de entrega garantida.