

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO MAXY NUTRE

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA – MS 1.02078-20029

Descrição do Produto	Confeccionada em tubo de poliuretano graduado, com linha radiopaca, flexível, biocompatível, medindo 70cm de comprimento, fabricada no calibre N°6 FR. O produto dispõe de um conector Y com tampa de duplo acesso, orifícios laterais e um fio guia em aço, podendo se adaptar facilmente a anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas.
Calibres	N° 06 FR
Componentes	Conector Y
	Tubo de poliuretano graduado
	Fio guia em aço inox
Embalagem	PGC
Identificação e rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC n°665/2022

Indicação	Indicado para administração de dietas enterais, via nasogástrica, em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar, com tempo máximo de 30 dias de permanência do produto.
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Óxido de etileno.
Validade	Validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada.
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril Recomendamos quanto ao uso máximo do produto de 30 dias.
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Instruções de Uso	Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica. Inicie o procedimento de acordo com a orientação técnica. Aplique lubrificantes caso identifique a necessidade; avalie as narinas e introduza o tubo na narina mais desobstruída; introduza o tubo pela nasofaringe, guiando-o para baixo e não force a passagem do tubo se houver resistência; Caso o paciente apresente náuseas, vômitos, tosse, dispneia ou cianose, suspenda o procedimento imediatamente. Continue a progressão do tubo e após a o termino do procedimento fixe o tubo de acordo com o protocolo da instituição. Recomendamos antes de iniciar a dieta verificar o posicionamento da sonda através de exame de imagem.
Classificação Fiscal	9018.3921



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Código de barras

7898430460005	Maxy Nutre- Sonda para alimentação Enteral N° 06 Fr -1 unidade
7898430465390	Maxy Nutre- Sonda para alimentação Enteral N° 06 Fr - 25 unidades
7898430465406	Maxy Nutre- Sonda para alimentação Enteral N°06 Fr -600 unidades