

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO MAXY NUTRE

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO – MS 1.02078-20024

Descrição do Produto	Confeccionada em tubo de poliuretano graduado, com linha radiopaca, flexível, biocompatível, medindo 110 cm de comprimento, podendo ser fabricada nos calibres N°08,10 e 12FR. O produto dispõe de um conector Y com tampa de duplo acesso, um conector enteral, uma ponteira em PVC com esferas de aço inox, orifícios laterais e um fio guia em aço, podendo se adaptar facilmente a anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas.
Calibres	N° 08, 10 e 12 FR
Componentes	Conector Y
	Tubo de poliuretano graduado
	Conector enteral
	Fio guia em aço inox
	Ponteira com esferas em aço inox
Embalagem	PGC
Identificação e rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC n°665/2022
Indicação	Indicado para administração de dietas enterais, via nasogástrica, em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar normalmente.
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Óxido de etileno.
Validade	Validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril Recomendamos quanto ao uso máximo do produto de 30 dias.
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque
Instruções de Uso	Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica. Inicie o procedimento de acordo com a orientação técnica. Aplique lubrificantes caso identifique a necessidade; avalie as narinas e introduza o tubo na narina mais desobstruída; introduza o tubo pela nasofaringe, guiando-o para baixo e não force a passagem do tubo se houver resistência; Caso o paciente apresente náuseas, vômitos, tosse, dispneia ou cianose, suspenda o procedimento imediatamente. Continue a progressão do tubo e após a o termino do procedimento fixe o tubo de acordo com o protocolo da instituição. Recomendamos antes de iniciar a dieta verificar o posicionamento da sonda através de exame de imagem.
Classificação Fiscal	9018.3921

Código de barras

7898430465369	Maxy Nutre- Sonda para alimentação Enteral N°08 Fr -1 unidade
7898430465192	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°10 Fr -1 unidade
7898430465123	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°12 Fr- 1 unidade
7898430465376	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N° 08 Fr- 25 unidades
7898430465208	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°10 Fr- 25 unidades
7898430465154	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°12 Fr- 25 unidades
7898430465383	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N° 08 Fr-600 unidades
7898430465215	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°10 Fr- 600 unidades
7898430465161	Maxy Nutre - Sonda para Alimentação Enteral N°12 Fr- 600 unidades