

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: mai/21
	<b>Instrução de Uso RDC185/01</b>	IUMAH-T rev. 05

## Identificação do produto e Apresentação

**Nome Técnico:** Máscaras

**Nome Comercial:** Máscaras para Aerossolterapia Hudson RCI

**Modelos:** 1075, 1076, 1080, 1083, 1084, 1085, 1095, 1385, 1388

**Registro ANVISA:** 10342600044

O fabricante recomenda o uso único.

**Prazo de Validade:** 05 Anos

**Embalagem:** Unitária.

Pronto uso

Não estéril

## Fotos



1083



1084



1095



1075

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: mai/21
	<b>Instrução de Uso RDC185/01</b>	IUMAH-T rev. 05

### **Indicação de Uso/Finalidade**

As máscaras de aerosolterapia são usadas em conjunto com nebulizadores para fornecer gás umidificado para os pacientes pois realiza a hidratação, mobilização e remoção da secreção ressecada, auxilia na melhora da função muco-ciliar e do mecanismo da tosse.

Indicado para os seguintes casos:

- Pacientes que necessitam de apoio à ventilação assistida com aerossol;  
Pacientes com via aérea artificial necessitam de um sistema artificial de umidificação;
- Pacientes com secreção espessa que tendem a desenvolver patologias;
- Durante o período de recuperação pós-extubação;
- Pacientes que serão submetidos a broncoscopia;
- Pacientes com patologias obstrutivas e inflamatórias.

### **Modo de Uso**

- Conecte um tubo de suprimento de aerossol entre a máscara e a fonte de gás.
- Se houver indicação, um nebulizador pode ser conectado à entrada da máscara e a linha de suprimento pode ser conectada diretamente à fonte de gás.
- Ajuste o fluxo apropriado de gás e verifique se o fluxo está passando através da máscara.
- Coloque a máscara na face do paciente de modo que ela se ajuste adequadamente.
- Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura.

### **Componentes e Composição**

Corpo da máscara: PVC

Tira elástica: vinil.

Tira de metal: Alumínio

Produto livre de látex

### **Condições de Armazenamento**

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: mai/21
	<b>Instrução de Uso RDC185/01</b>	IUMAH-T rev. 05

#### **Condições para o Transporte**

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

#### **Condições de Manipulação**

N/A

#### **Advertências**

- Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos.

#### **Precauções**

- Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos.
- Um bom ajuste da máscara facial à face do paciente é essencial. Ele evita vazamentos de gás sem que seja necessário exercer muita pressão à face do paciente.

**Importador/Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729.

**Fabricante Responsável:** Teleflex Medical Incorporated; 3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, North Carolina, 27560 - EUA.