

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: mai/21
	Instrução de Uso RDC185/01	IUCNH-T rev. 05

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Cânula Nasal

Nome Comercial: Cânula nasal ajustável sobre orelhas – Hudson RCI

Modelos: 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1108; 1109; 1110; 1111; 1810; 1812; 1814; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1830; 1831; 1837; 1838; 1839; 1843; 1844; 1845; 1920; 1921.

Registro ANVISA: 10342600031

Proibido Reprocessar

Prazo de Validade: 05 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos



Tabela Comparativa

Código	Tamanho	Tamanho do tubo (m)	Tubo Star Lúmen	Tubo padrão	Ponta nasal padrão	Ponta nasal alargada	Ponta nasal Softech	Conector padrão	Conector Universal
1100	Adulto	2,1		X	X			X	
1101	Pediátrico	2,1		X	X			X	
1102	Adulto - vinil colorido	2,1		X	X			X	
1103	Adulto	2,1		X	X			X	
1104	Adulto	2,1		X		X		X	
1108	Adulto					X			
1109	Adulto				X				
1111	Adulto	2,1		X					
1810	Adulto	4,2	X		X			X	

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES							Emissão: mai/21
	Instrução de Uso RDC185/01							IUCNH-T rev. 05

1812	Adulto	7,5	X		X			X	
1814	Adulto	15	X		X			X	
1816	Adulto	3	X				X	X	
1817	Adulto	4,2	X				X	X	
1818	Adulto	4,2	X				X		X
1819	Adulto	2,1		X			X	X	
1820	Adulto	2,1	X	X			X	X	
1821	Adulto						X		
1827	Adulto	1,2	X				X	X	
1822	Adulto	2,1	X				X		X
1823	Adulto	7,5	X				X	X	
1824	Adulto	7,5	X				X		X
1825	Adulto	15	X				X		X
1826	Pediátrico	2,1	X				X		X
1828	Infantil	2,1	X				X	X	
1830	Adulto	10,5	X				X	X	
1831	Adulto	15	X				X	X	
1837	Pediátrico						X		
1838	Pediátrico	2,1	X				X	X	
1839	Pediátrico	4,2	X				X	X	
1843	Adulto	2,1		X	X				
1844	Adulto	2,1		X	X				
1845	Adulto	2,1		X					
1920	Adulto	2,1		X	X			X	X

Indicação de Uso/Finalidade

O oxigênio é administrado para tratar a hipoxemia e diminuir os sintomas associados. Ele pode ser entregue através de diversos dispositivos incluindo as cânulas nasais.

A cânula nasal é usada quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de O₂ para a qual uma precisão acurada não é essencial. Este método é relativamente simples de usar e permite que o paciente se mova em torno do leito, fale, tussa e coma sem interrupção do fluxo de O₂.

Possui dois pequenos tubos de aproximadamente 1 cm de comprimento que se encaixam no vestíbulo de cada narina. É confeccionado em material macio e flexível, com alça de contorno arredondado de lábios, estilo sobre-a-orelha, proporcionando conforto e segurança ao paciente

Modo de Uso

- Conecte o tubo na fonte de oxigênio e ajuste o fluxo conforme prescrição clínica. Verifique a permeabilidade do fluxo de gás através do tubo.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: mai/21
	Instrução de Uso RDC185/01	IUCNH-T rev. 05

- Insira as ponteiros nasais nas narinas com os dois tubos sobre as orelhas e abaixo do queixo. Caso necessário, as ponteiros nasais podem ser cortadas com uma tesoura para atender as características individuais de cada paciente, facilitando o ajuste.
- Cuidadosamente ajuste o anel de plástico dos tubos para fixar a cânula de maneira segura à face do paciente.
- Descarte após o uso

Componentes e Composição

Cânula: PVC

Tubo de suprimento: PVC

Produto sem látex.

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazenar e Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições de Manipulação

Não há condições especiais para o uso do produto.

Advertências

- Taxas de fluxo além de 6 litros por minuto podem levar à deglutição do ar e causar irritação da mucosa nasal e faríngea.

Precauções

- Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.
- Certifique que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente violação da embalagem, não utilizar o material.

Detentor do Registro, Importador e Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo - SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729.

Fabricante Responsável: Teleflex Medical Incorporated - 3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, North Carolina, 27560 – EUA.