

## **AVENTAL CIRÚRGICO SMS COM REFORÇO IMPERMEÁVEL**

**Modelos comerciais:** disponível nos tamanhos G (125 x 150cm), GG (130 x 160cm) e GGG (138 x 180cm) na cor azul, de não tecido de Polipropileno (PP) 100% com reforço impermeável na parte frontal e nas mangas.

**Indicação de uso:** Garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e fricção.

### **Instrução de uso:**

#### **Técnicas para vestir o avental cirúrgico SMS com reforço impermeável**

- Levantar o avental dobrado, tomando o cuidado de não tocar na mesa (figura 1);
- Mantendo uma distância segura da mesa, segurar a frente pelo interior do avental com ambas as mãos, na linha do pescoço, permitindo que o avental se desdobre cuidadosamente, mantendo seu interior próximo ao corpo (figura 2);
- Manter as mãos perto do nível dos ombros, escorregar ambos os braços para dentro da cava dos braços do avental simultaneamente. Não expor as mãos ao exterior dos punhos do avental;
- O auxiliar posiciona o avental acima dos ombros na região dos ombros e braços. As costas do avental devem ser protegidas com amarras na altura do pescoço e na altura da cintura (Figura 3);



Figura1



Figura 2



Figura 3

- Com as mãos protegidas para dentro do punho do avental, soltar os amarrilhos da etiqueta na frente do avental, passar para outro membro da equipe cirúrgica, que compõe o campo estéril, amarrar. Deste modo às costas ficarão completamente protegidas pela borda do avental (Figura 4);
- Se outros membros da equipe cirúrgica não estiverem disponíveis para auxiliar, solte os amarrilhos da etiqueta utilizando um instrumental estéril. Cuidadosamente dê o instrumental para o auxiliar. Esta então cobre as costas e coloca o instrumental de lado, que é considerado contaminado;

- Colocar a luva direita em cima do punho e só então posicionar o punho do avental e os dedos dentro da luva (Figura, 5, 6 e 7);
- A seguir colocar a luva esquerda, seguindo a mesma sequência (Figura 8 e 9).



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9

### **Técnica para retirada dos aventais cirúrgicos:**

- O avental deve ser removido sempre antes das luvas;
- Segurar o ombro direito soltando o avental com a mão esquerda, puxar o avental para baixo invertendo a manga para o avesso (Figura 10);
- Puxar o avental no avesso, distante do corpo, com o cotovelo flexionado (Figura 11);
- Pegar o ombro esquerdo com a mão direita e remover o avental totalmente, puxando para fora (Figura 12);



Figura 10

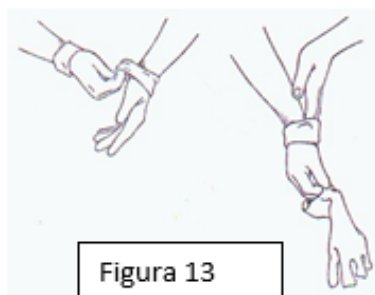


Figura 11



Figura 12

- Descartar o avental no lixo indicado;
- Remover as luvas sequencialmente, uma dentro da outra, e descartar no lixo indicado (Figura 13).



**Advertências / Precauções:** Produto de USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR.

Os aventais cirúrgicos SMS com reforço impermeável podem ser incinerados ou aterrados (Aterro Classe I) com segurança seguindo as recomendações da legislação municipal ou federal em vigor. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

- Descartável;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Isento de látex;
- Manusear com técnica asséptica;
- Este produto é esterilizado. Por favor, use-o imediatamente após a abertura.

**Armazenamento:** O produto deve ser armazenado nas seguintes condições:

- Em local seco e arejado;
- Em locais onde o acesso de raios solares é restrito;
- A embalagem deve estar protegida contra danos físicos;
- A embalagem deve estar protegida contra intempéries;
- Deve evitar fontes de ignição.

**Validade:** Os produtos têm validade de 5 anos observadas as condições de armazenamento. É proibido usar após a data de validade.

**Número de registro Anvisa:** 82036520001



**Fabricado por:**

Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd.

Area B, Baihua Road East, South Side of Erji river, Industry Cluster District,

Yanling 461200 , Henan, China

**Importado por:**

QLS - QUALITY LIFE SCIENCES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Avenida Piraíba, 296 – Sala 10 - Centro Comercial Jubran - CEP: 06460-121 - Barueri – SP

CNPJ 37.182.605/0001-50

AFE ANVISA Nº.8.20.365-2

**Responsável Técnico:** José Marques Simões Júnior - CRF-SP nº 14.919

**Serviço de Atendimento ao Consumidor:** 0800 878 8780

**Site:** <http://www.qlsbrazil.com>