

KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL SEM AVENTAIS

Modelo comercial: disponível na cor azul, de não tecido Polipropileno 100% com barreira de proteção impermeável, estéril.

O Kit Cirúrgico Universal Sem Aventais contém:

- 02 unidades de campos cirúrgicos laterais com reforço absorvente e impermeável;
- 01 unidade de campo cirúrgico superior com reforço absorvente e impermeável;
- 01 unidade de campo cirúrgico inferior com reforço absorvente e impermeável;
- 01 unidade de campo para cobertura de mesa de instrumentos e superfícies;
- 04 unidades de fitas adesivas avulsas.

Indicação de uso: O Kit Cirúrgico Universal Sem Aventais é de uso único, foi desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar e tem como principal indicação as cirurgias de diversas especialidades. Funciona como uma barreira e visa proteger o paciente e a equipe médica e de enfermagem, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto maleabilidade e alta resistência a rasgos e fricção.

As principais aplicações e finalidades de uso dos campos cirúrgicos são:

- Cobertura estéril para o paciente.
- Delimitar e favorecer o acesso da área a ser operada, expondo a área preparada para a cirurgia.
- Impedir a passagem de sangue, fluidos orgânicos e outros líquidos possivelmente contaminados de uma área para outra, evitando que microrganismos alcancem áreas não contaminadas.
- Estabelecer uma barreira de proteção, que reduz a passagem de microrganismos entre áreas estéreis e não estéreis.

Abrir a embalagem de forma asséptica e somente no momento do uso. Utilizar conforme procedimentos hospitalares pré-determinados.

Instrução de uso:

Instruções para utilização do Kit Cirúrgico Universal Sem Aventais

1. Segure a embalagem estéril e entre em uma área onde a embalagem possa ser aberta sem risco de contaminação.
2. O produto deve ser colocado na mesa instrumental, onde deve ser removido de sua embalagem secundária, grau cirúrgico. O campo para cobertura de mesa instrumental, que é a embalagem

primária do Kit, deve ser desdobrado conforme orientação de abertura para que o instrumental cirúrgico possa ser organizado, conforme especificado pelo usuário.

3. Os campos para cobertura de paciente devem ser desdobrados e colocados, na ordem que se apresentarem. Conforme exemplificado nas figuras 1 e 2.



Figura 1



Figura 2

4. Utilizar técnica asséptica durante o manuseio.
5. Os médicos e enfermeiros devem higienizar as mãos antes do uso;
6. Os enfermeiros devem certificar-se de que a embalagem está completa antes de abri-la;
7. Classifique e verifique as peças de acordo com a necessidade;
8. Desinfetar a pele da área cirúrgica, de acordo com o tipo de cirurgia, colocar o campo cirúrgico e durante esse processo atentar para as informações de identificação e direção de implantação no campo cirúrgico. Normalmente, deita-se primeiro a área do lado oposto do operador, ou deita-se os lugares sujos antes dos limpos (por exemplo, a área do pé antes da área da cabeça);
9. Para campos que devem ser fixados no paciente, proceder à sua abertura e desdobramento de forma que as fitas adesivas, fiquem para baixo, ou seja, em contato com o paciente;
10. Os princípios da técnica cirúrgica estéril devem ser seguidos ao colocar o campo cirúrgico;

Após sua utilização, descartar o campo cirúrgico no lixo indicado.

Advertências / Precauções: Produto de USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR.

Os itens do Kit Cirúrgico Universal Sem Aventais requerem apenas os cuidados normais de manuseio de artigos estéreis e a observação da integridade relativa a produtos utilizados como barreira de proteção, tais como:

Produto de USO ÚNICO;

Descartável;

Não utilizar se a embalagem estiver violada;

Isento de látex;

Manusear com técnica asséptica;



Destruir após o uso;

PROIBIDO REPROCESSAR este produto;

Este produto é esterilizado. Por favor, use-o imediatamente após a abertura.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado nas seguintes condições:

- Em local seco e arejado;
- Em locais onde o acesso de raios solares é restrito;
- A embalagem deve estar protegida contra danos físicos;
- A embalagem deve estar protegida contra intempéries;
- Deve evitar fontes de ignição.

Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o armazenamento dos produtos cirúrgicos. Sendo assim, pode ser armazenado em ambientes sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima. Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil deste produto.

Validade: Os itens do Kit Cirúrgico Universal Sem Aventais têm validade de 5 anos observadas as condições de armazenamento. Proibido usar após a data de validade.

Número de registro Anvisa: 82036520005

Fabricado por:

Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd.

Area B, Baihua Road East, South Side of Erji River, Industry Cluster District,
Yanling 461200 , Henan, China

Importado por:

QLS - QUALITY LIFE SCIENCES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Avenida Piraíba, 296 – Sala 10 - Centro Comercial Jubran - CEP: 06460-121 - Barueri – SP

CNPJ 37.182.605/0001-50

AFE ANVISA Nº.8.20.365-2

Responsável Técnico: José Marques Simões Júnior - CRF-SP nº 14.919

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 878 8780

Site: <http://www.qlsbrazil.com>