

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 23/03/2009	
	Título CURATEC COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM	DIP número: SEQUA FT-16	
		Revisão: 49	Pág. 1 / 3

Registro na ANVISA: 80246910006

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum é um curativo primário, estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato de celulose (Rayon) impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas.

O petrolatum é uma mistura de hidrocarbonetos obtida por meio da remoção de óleos de minerais e que contém propriedades benéficas para a pele e para o tratamento de feridas. Isso porque o petrolatum é um eficiente umectante, contribuindo para a hidratação de pele íntegras ou lesadas.

O produto é esterilizado pelo processo de radiação ionizante e deve ser combinado com um curativo secundário estéril para que seja possível a absorção do exsudato da ferida.

Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum é fácil de aplicar e em contato com a ferida não adere como as gazes comuns de algodão, sendo capaz de ser removido facilmente durante as trocas de curativo, minimizando dor e traumas durante o procedimento e diminuindo a perda do tecido recém formado, o que contribui para o processo de cicatrização.

O tecido de Rayon é sintético, inodoro, poroso, isento de substâncias alergênicas e apresenta bordas bem acabadas. Por ser poroso, o curativo permite a respirabilidade da ferida e o fluxo do exsudato para que seja absorvido pelo curativo secundário, evitando o acúmulo de fluido no local da lesão. Além disso, o tecido de Rayon pode ser recortado para atender a necessidade de diferentes tamanhos de feridas sem provocar o desprendimento de filamentos.

O produto **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** é um curativo confortável, pois mantém a ferida sempre úmida pela presença da emulsão de petrolatum e, quando acompanhado pelo curativo secundário, o produto é capaz de evitar a perda excessiva de líquidos e manter a temperatura no local da aplicação, pois diminui a perda de calor pela ferida.

1.1. MECANISMO DE AÇÃO.

O mecanismo de ação do **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** é manter o meio hidratado por um processo não aderente, proporcionando um ambiente ideal para cicatrização e o amolecimento de possíveis tecidos inviáveis, sem agredir a ferida durante as trocas de curativo.

O amolecimento dos tecidos inviáveis presentes na lesão através da hidratação tem por objetivo favorecer seu desbridamento autolítico ou sua remoção mecânica, para que a presença deles não atrase o processo de cicatrização da pele.

Portanto, **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** estimula a cicatrização da ferida por mantê-la úmida e por facilitar a retirada de tecidos inviáveis que atrasam este processo. Além disso, o processo de hidratação da ferida alivia a dor pela umidificação de possíveis terminações nervosas expostas na lesão.

2. INDICAÇÕES.

Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum é indicado para o tratamento de feridas de qualquer etiologia, secas ou exsudativas, limpas ou infectadas, com presença de tecido inviável ou não e outros tipos de feridas em que se deve evitar a aderência do curativo, como por exemplo, feridas com exposição de ossos e tendões.

Essas indicações incluem vários tipos de lesões, como:

- ferida cirúrgica;
- queimaduras de segundo grau de pequena extensão;
- áreas doadoras e receptoras de enxertos;
- úlceras venosas, arteriais ou por pressão;
- feridas com tecido de granulação;
- áreas pós-trauma ou pós-ressecção cirúrgica.

2.1. CONTRAINDICAÇÕES.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 23/03/2009	
	Título CURATEC COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM	DIP número: SEQUA FT-16	
		Revisão: 49	Pág. 2 / 3

Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum não deve ser utilizado em pacientes com conhecida sensibilidade ao produto ou a algum de seus componentes. Além disso, seu uso não é indicado para pacientes que estejam recebendo tratamento por câmara hiperbárica.

3. INSTRUÇÃO DE USO.

NOTA: O uso do **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** deve ser monitorado por um profissional da saúde, que deverá aplicar o produto de maneira higiênica, com luvas, para garantir segurança para si próprio e para o paciente.

As instruções de uso do produto consistem em:

- irrigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição de saúde;
- remover o excesso de exsudato e tecidos inviáveis, quando necessário;
- limpar a pele ao redor e secar bem;
- escolher o tamanho (apresentação) da compressa que melhor se adapte ao tamanho da ferida. A cobertura também pode ser aplicada dobrada ou cortada para se adequar à necessidade da ferida.
- ocluir com uma cobertura secundária estéril e fixar.

3.1. INTERVALOS DE TROCA.

O uso do **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** deve ser monitorado por um profissional da saúde, que indicará a frequência adequada das trocas do curativo. O produto deverá ser substituído sempre que for observada a diminuição de sua característica não aderente.

4. APRESENTAÇÃO.

Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum é comercializado em envelopes hermeticamente fechados, acondicionados em cartuchos lacrados com selo de segurança, contendo folheto de instrução de uso.

Apresentações			
Tamanho	Nº de Curativos por envelope	Nº de envelopes por cartucho	Nº de cartuchos e/ou envelopes na caixa de embarque
K290076	1	50	5
K290203	1	36	5
K292033	3	12	5
K290406	1	24	5
K291524	1	1	12
K292000	1	1	12
K291502	1	5	5
BK290076	1	-	36
BK290203	1	-	36
BK292033	3	-	36
BK290406	1	-	18
BK291524	1	-	5
BK292000	1	-	5
BK291502	1	-	5

5. PRECAUÇÕES.

O tratamento de feridas com o produto **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** deve ser monitorado por um profissional da saúde, para que o produto seja corretamente aplicado e para que seja indicada a frequência adequada das trocas de curativo.

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 23/03/2009	
	Título CURATEC COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM	DIP número: SEQUA FT-16	
		Revisão: 49	Pág. 3 / 3

O curativo **Curatec® Compressa com Emulsão de Petrolatum** é um produto de uso único, não devendo ser reutilizado e devendo ser descartado depois da troca do curativo, sem qualquer precaução ou restrição específica. Deve-se agir conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar determinado pelo estabelecimento de saúde. Se o produto for reutilizado, o paciente possuirá grande risco de receber um tratamento não eficiente ou apresentar uma infecção no local da ferida ou generalizada, retardando o processo de cicatrização e prejudicando seriamente seu estado de saúde.

Em casos de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, suspenda a utilização imediatamente e procure orientação médica.

Não utilize o produto se a embalagem estiver violada e/ou danificada.

6. COMPOSIÇÃO.

Curativo estéril composto por tecido de rayon impregnado com emulsão de petrolatum (a base de óleo mineral, vaselina sólida e água).

7. REQUISITOS ANALÍTICOS LIMITES.

- **Avaliação visual da homogeneidade da impregnação:** Uniforme em toda a extensão do curativo
- **Odor:** característico do óleo mineral.

8. PRAZO DE VALIDADE.

Validade de 2 anos desde que seguidas as condições indicadas para o armazenamento.

9. ARMAZENAMENTO.

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente, mantendo-o na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz e umidade.

ELABORAÇÃO: Ariane R. Brogliato	APROVAÇÃO:	ALTERAÇÃO:
Aprovação inicial: Nesser C. Oliveira	Giselle Coelho	Jaqueline Silva
Emissão: Samuel A. B. Trindade	Data da publicação: 10/03/2023	Data: 10/03/2023

CÓPIA NÃO CONTROLADA