

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 18/09/2009	
	Título: CURATEC CARVÃO ATIVADO COM PRATA PLUS	DIP número: SEQUA FT-06	
		Revisão: 21	Pág. 1 / 2

Registro ANVISA nº 80246910011

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Curatec® Carvão Ativado com Prata Plus é um curativo primário e/ou secundário composto de tecido de carvão ativado impregnado com prata selado em toda sua extensão entre duas camadas de nylon.

O tecido de carvão ativado adsorve os gases voláteis, responsáveis pelo mau cheiro e os micro-organismos produtores dessa substância. A prata impregnada no tecido de carvão exerce efeito bactericida sobre os micro-organismos auxiliando no controle de infecção da ferida.

As camadas de nylon são não aderentes, semipermeáveis, isolante térmico e absorventes. A não aderência confere propriedades ao curativo de evitar a perda do tecido neoformado no momento de remoção e/ou troca.

A semi-permeabilidade do tecido permite fluxo do exsudato para o curativo secundário além de propiciar um micro-ambiente de umidade ideal para cicatrização da ferida. A característica de isolante térmico assegura a manutenção no leito da lesão da temperatura ótima para estimular a epitelização da ferida. O tecido de nylon possui características absorventes sendo que o exsudato excedente tem trânsito livre para o curativo secundário devido a sua semi-permeabilidade.

2. INDICAÇÕES

Curatec Carvão Ativado com Prata Plus é indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável.

Curatec Carvão Ativado com Prata Plus é um curativo que pode ser usado tanto como primário ou secundário. O curativo pode ser **cortado** para o tamanho que melhor se adapte à lesão.

3. MODO DE USO

Uso como curativo primário:

- Irrigar bem o leito da ferida com solução fisiológica 0,9%
- Secar somente a região periférica
- Colocar **Curatec Carvão Ativado com Prata Plus** sobre a ferida
- Ocluir com uma cobertura estéril.

O curativo pode ser recortado, se necessário.

Curatec Carvão Ativado com Prata Plus pode permanecer sobre a ferida até seu completo saturamento, podendo ser trocado no máximo a cada 7 (sete) dias. Inicialmente, pode ser necessário trocá-lo nas primeiras 24-48 h.

É importante ressaltar que a frequência da troca dependerá do volume do exsudato, controle da infecção e odor, devendo ser definida pelo profissional responsável e de forma individualizada.

Uso como curativo secundário:

- Irrigar bem o leito da ferida com solução fisiológica 0,9%
- Secar somente a região periférica
- Colocar curativo primário sobre a ferida
- Aplicar e fixar Curatec Carvão Ativado com Prata Plus

O curativo pode ser recortado, se necessário.

Trocar a cobertura secundária sempre que estiver saturada, ou conforme troca do curativo primário. A cobertura secundária não deverá permanecer na lesão por mais de sete (7) dias.

	Espécie: FICHA TÉCNICA	Data Instituição: 18/09/2009	
	Título: CURATEC CARVÃO ATIVADO COM PRATA PLUS	DIP número: SEQUA FT-06	
		Revisão: 21	Pág. 2 / 2

4. MODELOS COMERCIAIS:

Curatec Carvão Ativado com Prata Plus é comercializado em envelopes hermeticamente fechados, acondicionados em cartuchos e/ou caixa de embarque lacrados, contendo folheto de instrução.

Código	Modelo comercial	Nº de curativos por envelope	Nº de envelopes por cartucho	Nº de cartuchos e/ou envelopes na caixa de embarque
K301010	Curatec Carvão Ativado com Prata Plus 10,0 cm x 10,0 cm	1	10	6
K301020	Curatec Carvão Ativado com Prata Plus 10,0 cm x 20,0 cm	1	10	6
BK301010	Curatec Carvão Ativado com Prata Plus 10,0 cm x 10,0 cm	1	-	30
BK301020	Curatec Carvão Ativado com Prata Plus 10,0 cm x 20,0 cm	1	-	30

5. PRECAUÇÕES

Não secar o leito da ferida, pois este procedimento pode causar trauma ao tecido de granulação.

O fabricante recomenda o uso único; destruir e descartar depois do uso. Não utilizar se a embalagem individual estiver danificada/aberta. Não reesterilizar.

Em caso de ocorrência de alergias ou manifestações clínicas adversas, suspender o uso imediatamente e procurar orientação médica.

Ao usar *Curatec Carvão Ativado com Prata Plus* em associação com pomadas ou produtos oleosos, assegurar que o excesso dessas substâncias não comprometerá o desempenho do curativo.

O uso de *Curatec Carvão Ativado com Prata Plus* deve ser realizado sob a supervisão de um profissional da saúde.

6. COMPOSIÇÃO: *Curatec Carvão Ativado com Prata Plus* é constituído por tecido de carvão ativado impregnado com prata selado em toda sua extensão entre duas camadas à base de nylon.

7. REQUISITOS ANALÍTICOS E LIMITES:

Aparência: tecido de carvão com prata, prensado entre duas camadas à base de nylon.

Teor de prata: 25 microgramas/cm² / 0,1 – 0,3%

Gramatura: 110 - 150 g/m²

Gramatura total do laminado: ≥170 g/m²

8. PRAZO DE VALIDADE

Validade de 2 anos, mantendo o produto armazenado à temperatura ambiente e com embalagem intacta. Esta não pode estar aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

9. ARMAZENAMENTO:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz. Antes de utilizar leia as instruções.

ELABORAÇÃO: Cristina Yukimi Usui	APROVAÇÃO:	ALTERAÇÃO:
Aprovação inicial: Nesser C. Oliveira	Giselle Coelho	Samuel Trindade
Emissão: Ana Elisa Souza	Data da publicação: 10/08/2022	Data: 29/07/2022

CÓPIA NÃO CONTROLADA