	Espécie: <b>FICHA TÉCNICA</b>	Data Instituição: 13/10/2008	
	Título: <b>CURATEC HIDROGEL COM AGE</b>	DIP número: SEQUA FT-03	
		Revisão: 23	Pág. 1 / 2

**Registro na ANVISA nº 80246910007**

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

*Curatec Hidrogel com AGE* é um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. Esse processo de hidratação alivia a dor pela umidificação das terminações nervosas expostas na ferida.

O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica.

Curatec Hidrogel com AGE deve ser combinado com um curativo secundário e é um produto de uso único, não devendo ser reutilizado e devendo ser descartado depois da troca de curativo.

A esterilização é realizada por radiação ionizante gama de Cobalto 60.

## 2. INDICAÇÕES

Curatec Hidrogel com AGE é indicado para promover o desbridamento autolítico e estimular a cicatrização em feridas secas; superficiais ou profundas; com ou sem infecção, necrose ou esfacelo. Além disto, o hidrogel é ideal para a manutenção da viabilidade de ossos e tendões expostos em feridas profundas.

O produto também pode ser aplicado em quantidade moderada juntamente com uma cobertura secundária capaz de preencher fisicamente as cavidades provocadas por lesões na pele.

Essas indicações incluem vários tipos de lesões, como por exemplo:

- Feridas com tecido de granulação;
- Úlceras venosas, arteriais e por pressão;
- Queimaduras de segundo grau de pequena extensão;
- Feridas de perda parcial ou total de tecidos;
- Áreas pós-trauma.

### 2.1. CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser utilizado em pacientes com conhecida sensibilidade ao gel ou a algum de seus componentes.

## 3. MODO DE USO


O uso do produto deve ser monitorado por um profissional da saúde, que deverá aplicar o produto de maneira higiênica, com luvas, para garantir segurança para si próprio e para o paciente.

As instruções de uso do produto consistem em:

- Irrigar bem o leito da lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição;
- Limpar a pele ao redor e secar bem;
- Colocar o curativo de forma que o gel seja aplicado dentro da ferida assepticamente, não excedendo o nível da pele ao redor da ferida;
- Ocluir a ferida com uma cobertura secundária estéril e fixar.
- Para efetuar a remoção do produto deve-se irrigar o leito da ferida com solução fisiológica.

### Intervalos de troca

O uso do produto Curatec Hidrogel com AGE deve ser monitorado por um profissional da saúde, que indicará a frequência adequada das trocas do curativo, não sendo viável o uso por mais de setenta e duas horas. O curativo também pode ser trocado quando a cobertura secundária apresentar sinais de saturação.

	Espécie: <b>FICHA TÉCNICA</b>	Data Instituição: 13/10/2008	
	Título: <b>CURATEC HIDROGEL COM AGE</b>	DIP número: SEQUA FT-03	
		Revisão: 23	Pág. 2 / 2

#### 4. MODELOS COMERCIAIS

Curatec Hidrogel com AGE é comercializado em bisnagas de alumínio, acondicionadas em cartucho e/ou caixa de embarque lacrados, contendo folheto de instrução.

Código	Modelo Comercial	Nº de bisnagas por cartucho	Nº de bisnagas e/ou cartucho por caixa de embarque
K210015	Curatec Hidrogel com AGE 15 g	10	6 cartuchos
K210030	Curatec Hidrogel com AGE 30 g	3	6 cartuchos
BK210015	Curatec Hidrogel com AGE 15 g	0	24 bisnagas
BK210030	Curatec Hidrogel com AGE 30 g	0	24 bisnagas

#### 5. PRECAUÇÕES:

O tratamento de feridas com o produto Curatec Hidrogel com AGE deve ser acompanhado por um profissional da saúde.

O curativo Curatec Hidrogel com AGE é um produto de uso único, não devendo ser reutilizado e devendo ser descartado depois da troca de curativo. Deve-se agir conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar determinados pelos técnicos do estabelecimento de saúde.

Em casos de irritação ou sensibilidade (reação alérgica) durante o uso do produto, suspenda a utilização e consulte um profissional da saúde.

Não utilize o produto se a embalagem estiver violada e/ou danificada.

#### 6. COMPOSIÇÃO:

Água purificada, propilenoglicol, polímeros hidrofílicos: carbômero (Carbopol) e acrilatos, trietanolamina e óleos de origem vegetal.

#### 7. REQUISITOS ANALÍTICOS E LIMITES

- Aparência: emulsão cremosa branca, sem separação de fases e/ou pontos pretos.
- pH: 6,0 – 8,0
- Densidade: 0,9 - 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### 8. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade de dois anos é válido seguindo as condições indicadas para o armazenamento.

#### 9. ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente, mantendo-o na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz e umidade. Deve-se evitar refrigeração e exposição à umidade excessiva.

<b>ELABORAÇÃO:</b> Daniela G. Pantalena.	<b>APROVAÇÃO:</b>	<b>ALTERAÇÃO:</b>
<b>Aprovação inicial:</b> Nesser C. P. Oliveira	Chaiane Siqueira	Jaqueline Silva
<b>Emissão:</b> Ana Elisa Souza	<b>Data da publicação:</b> 25/10/2021	Data: 04/10/2021