



Leukomed® T

Filme para fixação, totalmente transparente

Descrição:

Filme em poliuretano e poliéster transparente, fino, arredondado, sem brilho, flexível, estéril, impermeável à água e bactérias, com taxa de transmissão de vapor (MVTR) de 930g/m²/24h, com adesivo de poliacrilato em toda superfície, protegido por papel branco siliconado e suporte superior com linha vermelha, para aplicação única. Apresentação sem janela. Livre de Látex. Embalagem estéril.

Indicações:

Indicado para proteger feridas superficiais, feridas pós cirúrgicas e para fixação estéril de curativos. Pode ser utilizado para fixação de cateteres e proteção de feridas não secretoras. Por ser transparente facilita a inspeção do local onde foi aplicado e por ser respirável reduz o risco de macerações da pele.

O produto pode permanecer de um a 7 dias, dependendo do estado da ferida e da condição da pele.

Leukoplast®

Tratamento de feridas nas melhores mãos

Advertências e Precauções:

Utilize o produto apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize em pacientes com intolerância conhecida a adesivos acrílicos.

Contraindicações:

Não aplicável.

Composição do produto:

Filme de transparente de poliuretano e poliéster, adesivo de poliacrilato e papel branco siliconado para proteção do adesivo. Película superior com fita vermelha.

Características	Benefícios
Filme ultrafino	Conformável à pele
Bordas arredondadas	Permite que a cobertura permaneça por mais tempo no local
Excelente MVRT	Diminui o risco de maceração
Radiotransparente	Não precisa ser removido para exames
Filme de suporte com linha vermelha	Facilita a aplicação
Fácil aplicação	Segurança, menor risco de infecção

Modo de Uso:

1. Abra o envelope e retire o curativo.
2. A linha vermelha indicativa orienta a direção correta de retirar o papel que protege o curativo.
3. Retire o papel branco siliconado conforme indicado e coloque a face adesiva sobre a área desejada.
4. Por último, retire a película com a linha vermelha após a fixação do produto.

Esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Armazenar em local limpo, seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz

Fabricação: BSN Medical - Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000052

Validade do Registro: Não aplicável.

NCM: 30.05.9090

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

Apresentação:

Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
72381-00	027298	72381-00	5cm X 7,2cm	Cx. c/ 50 unid.
72381-01	027299	72381-01	8cm X 10cm	Cx. c/ 50 unid.
72381-08	027300	72381-08	10cm X 12,5cm	Cx. c/ 50 unid.
72381-09	027301	72381-09	15cm X 20cm	Cx. c/ 50 unid.
72381-10	027302	72381-10	15cm X 25cm	Cx. c/ 50 unid.