

INSTRUÇÕES DE USO StatLock™ Pro

O procedimento deve ser realizado por profissional treinado com conhecimento de marcos anatômicos, técnica segura e potenciais complicações.

Indicações de uso:

O StatLock™ Pro é um dispositivo de estabilização para cateteres compatíveis.

Contraindicações:

Alergias conhecidas a fitas ou adesivos.

Advertências e Precauções:

- **ATENÇÃO:** após a utilização, este produto pode constituir um potencial risco biológico. Manusear e descartar de acordo com as práticas médicas aprovadas e com a legislação e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.
 - **ADVERTÊNCIA:** destina-se a uma única utilização. Não reutilizar. A reutilização e/ou re-embalagem pode criar um risco de infecção no paciente ou no usuário, comprometer a integridade estrutural e/ou as características essenciais do material e do projeto do dispositivo, o que poderá resultar na falha do dispositivo e/ou em lesões, doença ou a morte do paciente.
 - Não utilizar o dispositivo de estabilização StatLock™ Pro onde possa ocorrer perda de aderência.
 - Observar as precauções universais relativas a sangue e fluidos corporais e os procedimentos de controle de infecções durante a aplicação e a remoção do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.
 - Evitar o contato do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro com álcool, uma vez que este pode enfraquecer a ligação dos componentes e a aderência da placa adesiva.
 - Minimizar a manipulação do cateter/tubo durante a aplicação e remoção do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.
 - O dispositivo de estabilização StatLock™ Pro deve ser substituído, pelo menos, a cada 7 dias ou de acordo com o protocolo institucional.
- Utilizar técnica asséptica para aplicar e remover o dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.
Consultar as ilustrações para obter detalhes específicos.

Aplicação:

1. Preparar a área alvo para o dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.
 - a. Utilizar álcool para limpar e remover a oleosidade da pele.
 - b. Aplicar protetor de pele para melhorar a aderência e proteção da pele.
- c. **DEIXAR SECAR COMPLETAMENTE.**



NOTA: SEMPRE CONECTAR O DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO STATLOCK™ PRO AO CATETER ANTES DE ADERIR A PLACA ADESIVA À PELE.

2. Posicionar o dispositivo de estabilização StatLock™ Pro com a seta apontando para o local de inserção.
3. Pressionar o dispositivo de estabilização StatLock™ Pro contra o conector do cateter.
4. Encaixar a placa de conforto debaixo do hub do cateter.
5. Retirar o papel protetor do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro um lado de cada vez e pressionar o dispositivo contra a pele.
6. Terminar de aplicar o curativo no local de inserção de acordo com o protocolo institucional.

Remoção:

1. Remover o adesivo do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro com álcool (se indicado) enquanto levantar com cuidado a placa adesiva do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.
2. Desconectar o hub do cateter do retentor do dispositivo de estabilização StatLock™ Pro.

Bard e StatLock são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da C. R. Bard, Inc. (subsidiária integral da BD). Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
©Copyright 2020 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados.

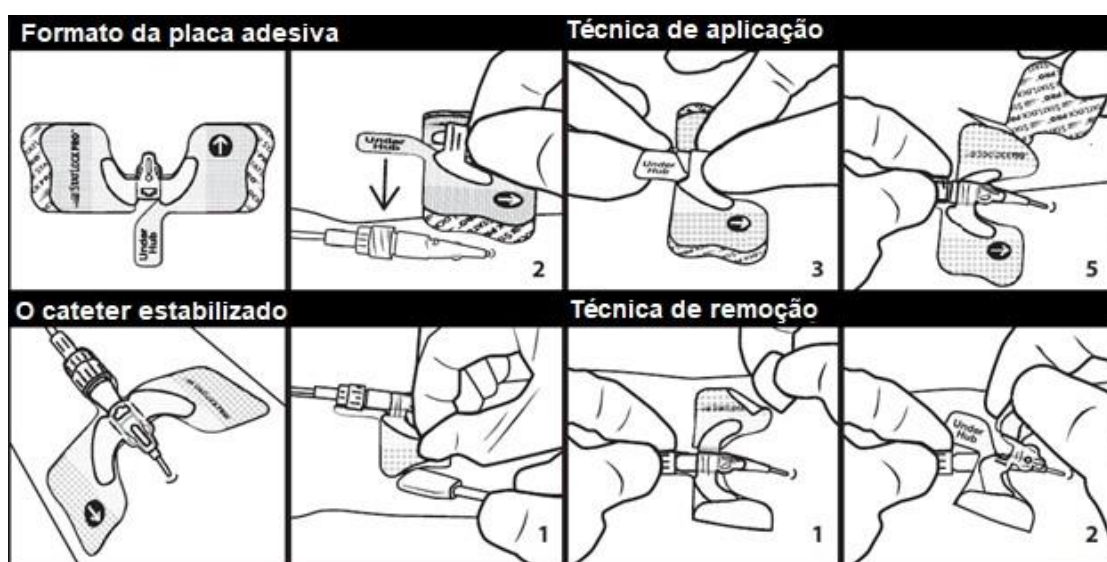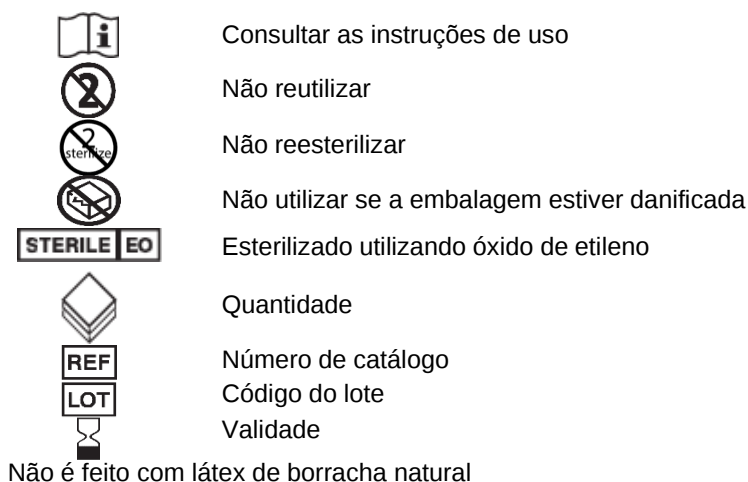

Conteúdo da embalagem: 1 StatLock™ Pro, 1 protetor de pele e 2 tiras adesivas estabilizadoras
 Manter afastado da luz solar. Manter seco.
 Estéril. Esterilizado utilizando óxido de etileno.
 Fabricante recomenda o uso único.
 Feito no México.

Fabricante:

Bard Access Systems, Inc.
 605 North 5600 West,
 Salt Lake City, UT 84116
 Estados Unidos da América

Importador:

Bard Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Ltda.
 CNPJ: 10.818.693/0001-88
 Rua Alexandre Dumas, 1.976 – 1º andar – Sala Bard
 CEP: 04717 -004 - São Paulo - SP
 Resp. Téc.: Cristina M. de Almeida, CRF-SP 22669
 SAC: 0800 0555654 (cs_brasil@bd.com)
 ANVISA/MS nº: 80689090191