

**NOME DO PRODUTO: AGULHA SPINAL RAQUI PONTA LANCETA (QUINCKE)
UNIEVER UNISIS**

Registro MS: 10150470179

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulhas

Matéria Prima: Aço Inox + Policarbonato

Método de Esterilização: **OXIDO DE ETILENO**

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

As agulhas para raquianestesia ponta Quincke – UNISIS, possuem cânula com parede fina assegurando maior diâmetro interno para retorno mais rápido do líquido e melhor infusão do anestésico. Conector Luer lock transparente para melhor visualização do retorno líquido e infusão do medicamento. Estilete ajustado ao bisel evitando a obstrução da agulha e ponta proximal colorida seguindo o padrão internacional de cores.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizada em anestesia raquidiana em procedimento cirúrgico.

INSTRUÇÃO DE USO

- Seguir o protocolo de técnica médica.
- A agulha somente deve ser utilizada por pessoal treinado.
- Checar a integridade da agulha, antes do uso.
- Retirar a agulha de sua embalagem em condições assépticas, de modo que o manuseio não provoque sua contaminação.
- Posicionar o paciente em decúbito lateral para que não haja risco de extravasamento.
- Fazer assepsia da pele antes de usar a agulha.
- Quando remover o protetor da agulha, seja cuidadoso, não aplique excessiva pressão no eixo.
- Se for usar agulha com diâmetro menor que 25G, use o guia correspondente à agulha ao mesmo tempo para prevenir dobras no eixo da agulha.
- Agulhas com estilete devem ser usadas com o estilete inserido na agulha.
- Descartar a agulha prontamente após o uso.
- Após o término, o paciente deverá ser colocado em decúbito dorsal.

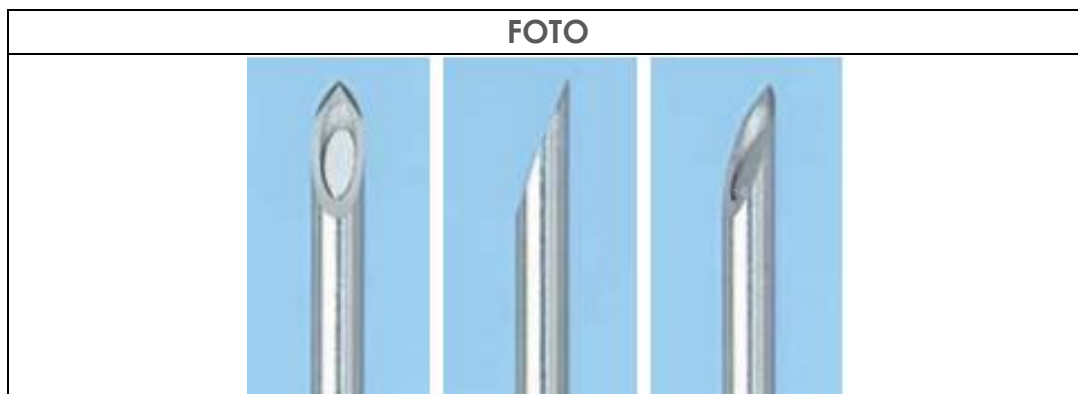
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto constituído por cânula aço inox com ponta precisamente afiada e trifacetada, que permite uma suave penetração e rápido fechamento após a retirada da agulha.

O estilete é feito de aço inox rígido para manter a dureza necessária para exata e suave técnica da punção.

Canhão luer lock em Policarbonato transparente.

Calibres de 20G a 29G


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

- SEM INTRODUTOR:**

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMP	ESPECIFICAÇÃO	COR CANHÃO	INDICAÇÃO
S209	20G	3 ½"	90X09	AMARELA	
S2015	20G	6"	150X90	AMARELA	OBESO
S218	21G	3"	80X08	VERDE	
S2225	22G	1"	25X07	PRETA	PEDIATRIA
S224	22G	1 ½"	40X07	PRETA	PEDIATRIA
S227	22G	2 ½"	70X07	PRETA	
S228	22G	3"	80X07	PRETA	
S229	22G	3 ½"	90X07	PRETA	
S237	23G	2 ½"	70X06	AZUL CLARA	
S238	23G	3"	80X06	AZUL CLARA	
S239	23G	3 ½"	90X06	AZUL CLARA	
S255	25G	2"	50X05	LARANJA	PEDIATRIA
S2525	25G	1"	25X05	LARANJA	PEDIATRIA
S258	25G	3"	80X05	LARANJA	
S259	25G	3 ½"	90X05	LARANJA	
S268	26G	3 ½"	80X4,5	MARROM	
S269	26G	3 ½"	90X4,5	MARROM	

- COM INTRODUTOR:**

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMP	ESPECIFICAÇÃO	COR CANHÃO	INDICAÇÃO
S2218G	22G	7"	178X07	PRETA	OBESO
S259G	25G	3 ½"	90X05	LARANJA	
S2512G	25G	4 ¾"	120X05	LARANJA	OBESO
S268G	26G	3"	80X4,5	MARROM	
S269G	26G	3 ½"	90X4,5	MARROM	
S278G	27G	3"	80X04	CINZA	
S279G	27G	3 ½"	90X04	CINZA	
S2712G	27G	4 ¾"	120X04	CINZA	OBESO
S299G	29G	3 ½"	90X3,5	VERMELHA	

- **Introdutor acoplado a agulha**

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

As agulhas são embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.

Possuem código de barra na embalagem

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservada e transportada e sua embalagem original até o momento de sua utilização, em ambiente seco e arejado.

Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Retirar assepticamente de sua embalagem original, em ambiente estéril.

Se o cateter não puder ser introduzido suavemente, descontinue o uso.

Se a conexão da seringa com o conector da agulha não for bem-feita pode causar vazamento de fluidos, descontinuar o uso.

Não use força excessiva para avançar a agulha.

Não deve ser reutilizada ou reesterilizada.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259