

NOME DO PRODUTO: CURATIVO TRANSPARENTE-PHARMAPLAST

Registro MS: 10150470516

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Curativo

Matéria Prima: Poliuretano

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Curativo Transparente Pharmaplast é composto de um filme de poliuretano permeável a gases e impermeável à água que deve ser aderido à pele para promover a fixação de cateteres ou curativos, proteção de feridas, barreira contra bactérias e água, sem provocar dor no momento de sua retirada.

INDICAÇÃO DE USO

O Curativo Transparente Pharmaplast é indicado como protetor para feridas não infectadas, secas ou com pouco exsudato, e também pode ser usado para fixação de cateteres intravenosos ou curativos em geral, e ainda como barreira contra germes e água em curativos absorventes.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Prepare a superfície de acordo com o protocolo da instituição.
2. Remover a parte maior do papel suporte.
3. Aplicar o produto com o local de punção do cateter no centro e então remover a parte menor do papel suporte.
4. Alisar o curativo sobre a pele e remover a Fita de fixação.
5. Remover a parte restante do filme suporte.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
IVFS.5057	CURATIVO IV TRANSP. FENESTRADO COM BORDA 5X5-7CM	
IVFS.67	CURATIVO IV TRANSP. FENESTRADO COM BORDA E FITA DE IDENTIFICAÇÃO 6X7CM	
IVFS.79	CURATIVO IV TRANSP. FENESTRADO COM BORDA, DUAS FITAS DE FIXAÇÃO E FITA DE IDENTIFICAÇÃO 7X9CM	
IVFS.85115	CURATIVO IV TRANSP. FENESTRADO COM BORDA, DUAS FITAS DE FIXAÇÃO E FITA DE IDENTIFICAÇÃO 8,5X11,5CM	

PRFS67	CURATIVO TRANSP. 6X7 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1010	CURATIVO TRANSP. 10X10 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1015	CURATIVO TRANSP. 10X15 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1020	CURATIVO TRANSP. 10X20 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1025	CURATIVO TRANSP. 10X25 FRAME STYLE BORDA PROTECT	
PRFS1030	CURATIVO TRANSP. 10X30 FRAME STYLE BORDA PROT.	
PRFS1520	CURATIVO TRANSP. 15X20 FRAME BORDA PROT.	

PRFS4545	CURATIVO TRANSP. 4,5X4,5CM FRAME STYLE BORDA PROT.	
PRFS4867	CURATIVO TRANSP. 4,8X6,7CM FRAME STYLE BORDA PROT.	
PROT706	CURATIVO TRANSPARENTE 7X6CM PROTECTFILM	
PROT755	CURATIVO TRANSPARENTE 7,5X5CM PROTECTFILM	
PROT7510	CURATIVO TRANSPARENTE 7,5X10CM PROTECTFILM	
PROT7512	CURATIVO TRANSPARENTE 7,5X12CM PROTECTFILM	
PROT825	CURATIVO TRANSPARENTE 8,2X5CM PROTECTFILM	
PROT8565	CURATIVO TRANSPARENTE 8,5X6,5CM PROTECTFILM	

PROT1012	CURATIVO PROTECTFILM 10X12CM	
PROT1014	CURATIVO PROTECTFILM 10X14CM	
PROT1016	CURATIVO PROTECTFILM 10X16CM	

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O Curativo Transparente Pharmaplast é fornecido esterilizado por Óxido de Etileno, embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico e a seguir em caixa de papel cartão com 50, 75, 100 e 150 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deverá ser armazenado em ambiente seco e limpo, abrigado da luz solar, em temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Limpar a área de aplicação, remover toda umidade e poeira.

Suspender o uso do curativo se sintomas coceiras ou erupções de pele ocorrerem.

Trocar o curativo quando este ficar sujo, perder a aderência ou ao trocar os cateteres.

Embalagem estéril deve ser aberta apenas no momento do uso.

A esterilidade não está garantida se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259