

NOME DO PRODUTO: SONDA DE DRENAGEM NELATON – WELL LEAD

Registro MS: 10150470370

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: Látex siliconizado vermelho

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A sonda de drenagem Nelaton da Well Lead é composta por látex siliconizada vermelha, atóxica em forma de tubo flexível em peça única, estéril. Possui ponta distal cilíndrica fechada, com dois furos laterais / distal, com apresentações de 6 Fr a 26 Fr com 40 cm de comprimento.

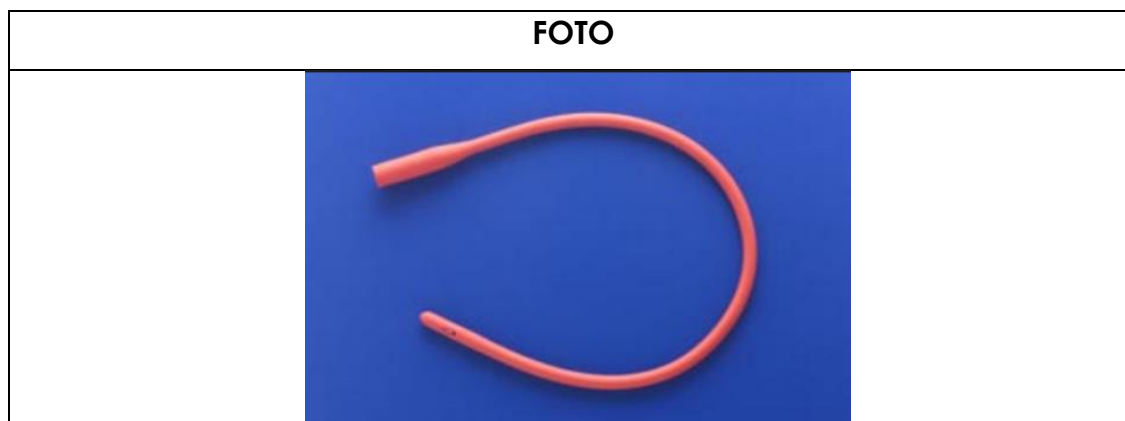
INDICAÇÃO DE USO

As sondas de drenagem são indicadas para drenagem de urina de rotina (sondagem de alívio). Não sendo concebidas como sondas permanentes. As suas características mais distintas são a sua ótima rigidez, a sua resistência ao dobramento e alta flexibilidade.

INSTRUÇÃO DE USO

- Realizar procedimento de assepsia local;
- Lubrificar a sonda e introduzir via uretra até a bexiga;

- Realizar a drenagem urina;
- Retirar a sonda
- Descartar conforme normas de descarte da instituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
110.10.600	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 6 Fr
110.10.800	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 8 Fr
110.11.000	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 10 Fr
110.11.200	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 12 Fr
110.11.400	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 14 Fr
110.11.600	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 16 Fr
110.11.800	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 18 Fr
110.12.000	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 20 Fr
110.12.200	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 22 Fr
110.12.400	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 24 Fr
110.12.600	Sonda de Drenagem Nelaton 2 furos - 26 Fr

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem individual em papel grau cirúrgico, Produto estéril, esterilizado em Óxido de Etileno, validade de 05 anos. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na embalagem original e num ambiente seco de preferência protegidos da fonte calor direto ou indireto.

Transportar na embalagem original afim de não comprometer a integridade e a esterilidade do produto.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Não usar se embalagem danificada;

Produto de USO ÚNICO;

PROIBIDO REPROCESSAR;

Deve ser aberto apenas no momento do uso.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259