

NOME DO PRODUTO: AGULHA HUBER POLIPERF SAFE PEROUSE

Registro MS: 10150470566

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulhas Descartáveis.

Matéria Prima: Aço Inox 304

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x)Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Agulha Huber Polyperf Safe é uma agulha reta disponível em diferentes tamanhos e diâmetros. Caracterizada por ter: extensão em PVC, livre de DEHP, dispositivo de segurança atendendo a NR-32. Apresenta sistema de “Pressão Positiva” a fim de evitar o refluxo de sangue para parte distal, evitando assim a obstrução do cateter totalmente implantável.

INDICAÇÃO DE USO


As agulhas Huber são indicadas para administração ou retiradas de fluidos a partir de câmaras de cateteres implantáveis (CCI).

INSTRUÇÃO DE USO

Punção


- ✓ Respeitar as medidas de higiene e de assepsia rigorosas ao utilizar as agulhas Huber;
- ✓ Preparar o local do porte para introdução de agulha estéril;
- ✓ A escolha da agulha de Huber deve ser feita em relação ao calibre em função da viscosidade e de fluxo pretendidos, do comprimento adaptado à espessura subcutânea do paciente;
- ✓ Purgar a agulha com soro fisiológico;
- ✓ Respeitar as etapas da anti sepsia cutânea antes de introduzir uma agulha estéril na pele;
- ✓ Retirar a proteção da agulha e promover a injeção do medicamento após controle do correto posicionamento e da boa permeabilidade do sistema;
- ✓ Realizar um curativo de oclusão estéril que permita uma perfeita visibilidade do ponto de punção.
- ✓ Realizar o acompanhamento regular durante a injeção.

Retirada

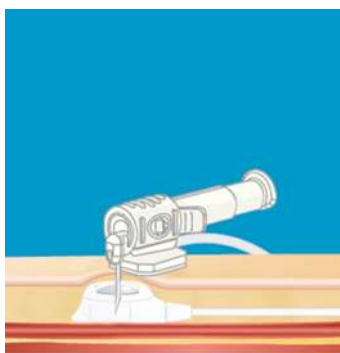

Posição padrão da
Agulha durante o uso
(Embolo na posição
horizontal);

Levante o embolo e o
coloque na posição
vertical;

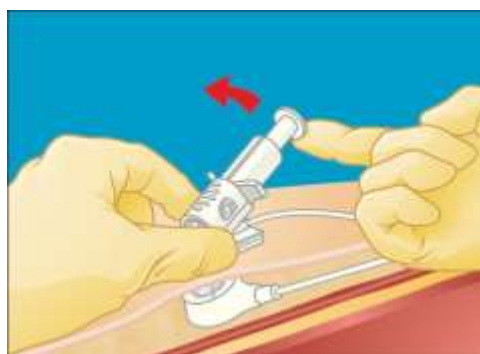



Remova a agulha com uma mão imediatamente após injetar solução salina (Pressão Positiva) com a outra.

Descarte em recipiente apropriado, sem qualquer risco de contato com a agulha suja de sangue depois de ser recolhido em posição de segurança.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cânula	Aço Inoxidável 304
Base e Protetor de Cânula	PVC Macio
Tubo	PVC
Clamp	Resina acetel

Tamanhos:

- Diâmetro: 22G comprimento: 17mm
- Diâmetro: 20G comprimento: 17mm
- Diâmetro: 22G comprimento: 20mm
- Diâmetro: 20G comprimento: 20mm
- Diâmetro: 22G comprimento: 25mm
- Diâmetro: 20G comprimento: 25mm
- Diâmetro: 19G comprimento: 25mm
- Diâmetro: 20G comprimento: 30mm
- Diâmetro: 20G comprimento: 35mm

FOTO**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
601.707	CANULA PUNÇÃO P/ PORT INFUSAO 22GX17MM
601.709	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX17MM
602.007	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 22GX20MM
602.009	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX20MM
602.507	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 22GX25MM
602.509	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX25MM
602.511	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 19GX25MM
603.009	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX30MM
603.509	CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX35MM

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalados individual em blíster de pvc rígido e em embalagens secundarias com 12 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- ✓ Dispositivo médico de utilização única;
- ✓ A alteração ou a tentativa de reintrodução da agulha pode levar a uma picada acidental com uma agulha contaminada;
- ✓ Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver danificada, aberta ou se estiver fora do prazo de validade;
- ✓ Punção numa CCI: Afastar-se sempre ligeiramente do ponto de punção anterior, para evitar a formação de risco de organização de canal, comunicação ou fístula entre o septo e a pele do paciente.
- ✓ Se houver dor durante o tratamento, suspender imediatamente a perfusão e avisar ao médico responsável;
- ✓ Verificar que o comprimento da cânula de punção está adaptado à CCI e à espessura subcutânea do paciente: Se for muito cumprida, a cânula de punção ou a CCI pode ser danificada no momento da punção; Se for muito curta, a cânula de punção pode não perfurar o septo da CCI e a solução medicamentosa será administrada nos tecidos adjacentes e/ou a agulha pode ficar obstruída.
- ✓ Evitar o contato da ponta de Huber com o fundo da caixa da CCI (risco de deterioração do septo aquando da retirada).

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259