



Cânula de Guedel Descarpack

DESCRIÇÃO

A **Cânula de Guedel Descarpack** é um dispositivo translúcido, estéril e apirogênico, desenvolvido para manutenção das vias aéreas permeáveis, além de proteger a cavidade oral, dentes, lábios e língua do paciente de sofrer danos durante a contração muscular involuntária e desordenada. Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia, possui acabamento suave e flexível, reduzindo riscos de danos.

Como cada indivíduo possui uma disposição anatômica diferente, a **Cânula de Guedel Descarpack** adequa-se a fim de não produzir danos secundários à sua colocação, por isto possui diferentes tamanhos, que podem ser facilmente identificados na extremidade flangeada da cânula.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660280

Fabricante: Jiaxing Jiuhai Medical Technology Co., Ltd

INDICAÇÃO DE USO

A **Cânula de Guedel Descarpack** é indicada para manter a passagem orofaríngea desobstruída durante ou após anestesia geral e/ou em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos.

MODELOS DISPONÍVEIS

A **Cânula de Guedel Descarpack** é disponível nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento	Cor
000	40 mm	Rosa
00	50 mm	Azul
0	60 mm	Preto
1	70 mm	Branco
2	80 mm	Verde
3	90 mm	Amarelo
4	100 mm	Vermelho
5	110 mm	Laranja
6	120 mm	Roxo

COMPOSIÇÃO

- **Cânula de Guedel:** Polietileno (PE).

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Pacote	Quant. Caixa Máster
000	0790101	50 unidades	1000 unidades
00	0790201	50 unidades	1000 unidades
0	0790301	50 unidades	500 unidades
1	0790401	50 unidades	500 unidades
2	0790501	50 unidades	500 unidades
3	0790601	50 unidades	500 unidades
4	0790701	50 unidades	500 unidades
5	0790801	50 unidades	500 unidades
6	0790901	50 unidades	500 unidades

*Nota: Cada **Cânula de Guedel Descarpack** vem embalada unitariamente.*

INSTRUÇÕES DE USO

1. Para selecionar o tamanho adequado, posicionar a cânula lateralmente ao rosto do paciente, desde o ângulo da mandíbula (abaixo do lóbulo da orelha) até a comissura labial. O tamanho não deve ultrapassar esta medida;
2. Abrir a embalagem e retirar a cânula utilizando técnicas assépticas;
3. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e elevar seu queixo afim de abrir as vias aéreas;
4. Inserir a cânula com seu lado côncavo para o palato duro e fazer uma rotação de 180°, seguindo a anatomia da cavidade orofaríngea. Caso seja necessário, um abaixador de língua pode ser utilizado durante o procedimento;
5. Nota: Em crianças a cânula deve ser inserida diretamente sobre a língua para prevenir traumatismos secundários em seus dentes e palato.
6. Para retirar, puxe suavemente a cânula e descarte em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Produto de uso único;
- Fabricante recomenda uso único;
- Estéril - esterilizado por Óxido de Etileno;
- Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
- Não utilizar caso a embalagem estiver violada, rasgada ou molhada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.