

NOME DO PRODUTO: CURATIVO TRAQUEOSTOMIA PHARMAPLAST

Registro MS: 10150470544

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Curativo

Matéria Prima: Poliuretano

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Curativo para traqueostomia em espuma e filme de poliuretano. Feita com uma camada suave, fina e elástica de espuma de poliuretano laminado e revestida com filme de poliuretano respirável.

O Curativo para Traqueostomia Pharmaplast promove a absorção de exsudatos e funciona como barreira de agente infeccioso.

A espuma de poliuretano permite a sensação de conforto devido à sua textura macia e possui capacidade de absorção acima de 14g/g. Esse efeito permite um ambiente seco, porém com a umidade necessária para a fase de granulação e epitelização do tecido do estoma.

INDICAÇÃO DE USO

O Curativo para Traqueostomia Pharmaplast é indicado para absorção de exsudato e como barreira de agente infeccioso durante o uso de traqueostomia. Disponível em três tamanhos: 65x65mm; 60x80mm e 80x80mm para utilização adulto e pediátrica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FOTO


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO
6565	CURATIVO P/ TRAQUEOSTOMIA	65X65 _{MM}
6080	CURATIVO P/ TRAQUEOSTOMIA	60X80 _{MM}
8080	CURATIVO P/ TRAQUEOSTOMIA	80X80 _{MM}

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O Curativo para Traqueostomia Pharmaplast é fornecido unitariamente esterilizado por Óxido de Etileno, termoselado em envelope de polietileno e papel filme e a seguir em caixa de papel cartão com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deverá ser transportado em ambiente seco e limpo, abrigado da luz solar, em temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- A embalagem estéril deve ser aberta somente no momento do uso.
- Suspenda o uso do curativo se sintomas coceiras ou erupções de pele ocorrerem.
- Trocar o curativo quando atingir o nível máximo de exsudado, ficar sujo ou conforme instruído por um profissional de saúde.
- Para remover o curativo, levante suavemente os cantos do curativo longe da ferida.
- Limpar a ferida antes da aplicação de novo curativo.
- A esterilidade não está garantida se a embalagem estiver aberta ou danificada
- Uso único.
- Não contém látex.
- A ferida deve ser frequentemente inspecionada
- Devem ser consideradas medidas de suporte apropriadas (ex. antibióticos no caso de infecções).

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259