

FICHA TÉCNICA

URGOTUL Ag Curativo de contato lípido-colóide impregnado com sais de prata



Esterilização Esterilizado por Radiação Ionizante Beta (e-beam)

Registro Anvisa 80246910050

NCM 30059090

Descrição UrgoTul Ag é um curativo impregnado com sais de prata produzido utilizando a tecnologia lípido-colóide (TLC), uma inovação desenvolvida pelos Laboratórios URGO. O curativo consiste em uma matriz de tratamento de prata feito de uma rede têxtil 100% poliéster impregnado com partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose), vaselina, polímeros de coesão e sais de prata. UrgoTul Ag é não-adesivo e não-oclusivo e não adere ao leito da ferida

Marca UrgoTul Ag – Urgo

Fabricante Laboratories Urgo - 42 Rue de Longvic, 21300 Chenove – França

Composição do Produto UrgoTul Ag possui uma tecnologia denominada lípido-colóide (TLC), sendo constituído por uma rede têxtil 100% poliéster impregnada com partículas de hidrocolóide, partículas lipofílicas e sais de prata dispersas em uma matriz de vaselina. Essa massa contém carboximetilcelulose (hidrocolóide), óleo de parafina, vaselina e polímeros transportadores.

Propriedades Em contato com o exsudado da ferida, as partículas hidrocolóides (CMC) geleificam e combinam-se com a matriz para formar um filme lípido-colóide. Isto resulta em propriedades específicas. Manutenção de um ambiente úmido que promove a cicatrização. Remoção que não danifica o tecido recém-formado. Troca de curativos livre de dor para o paciente. Proteção da pele circundante. Além disso, os íons Ag⁺ da matriz de tratamento de prata (TLC-Ag) conferem ao UrgoTul Ag uma atividade antibacteriana capaz de reduzir a carga bacteriana local. A prata tem um largo espectro de atividade anti-microbiana contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas e certas leveduras. É particularmente eficaz contra *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* e *Pseudomonas aeruginosa* (bacilo pyocyanic), que são mais frequentemente responsáveis por feridas infectadas. O curativo demonstra atividade antibacteriana in vitro por até 7 dias. O efeito antibacteriano do curativo também contribui para a redução do odor.

Indicações UrgoTul Ag é indicado para o tratamento local de feridas com risco ou com sinais de infecção local: feridas crônicas (úlceras por pressão e úlceras de perna) e feridas agudas (queimaduras de espessura parcial, dermoabrasões, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, etc). Devido à natureza não-adesiva do curativo, UrgoTul Ag é recomendado para o tratamento de feridas em que a pele em torno da lesão esteja enfraquecida.

Modo de uso Limpe a ferida com soro fisiológico. Se um anti-séptico for usado previamente, lavar bem o ferimento com soro fisiológico antes de aplicar UrgoTul Ag. Se for necessário, UrgoTul Ag pode ser cortado com uma tesoura estéril para coincidir o tamanho do curativo com a ferida. - Retire as abas protetoras do curativo. - Aplique o curativo UrgoTul Ag diretamente sobre a ferida. Cubra UrgoTul Ag com um curativo secundário (cobertura estéril adequada para absorção de exsudado, fixada no local com uma bandagem de fixação).

Intervalos de Troca UrgoTul deve ser trocado a cada 2 a 4 dias dependendo do tipo de ferida e da sua condição clínica. O produto pode permanecer na ferida por até 7 dias dependendo da condição da ferida e do protocolo (quando prescrito a utilização com um sistema de bandagem compressiva para úlceras venosas de perna. Para pacientes com Epidermólise Bolhosa, o produto deve ser trocado a cada 1 a 3 dias.

Apresentações

Produto	Código	Tamanho	Caixa
UrgoTul Ag	551836	10x12cm	10 unidades
UrgoTul Ag	551837	15x15cm	10 unidades