



Hypafix[®] transparent:

Adesivo Transparente e Impermeável para Fixação de Curativos, Drenos e Cateteres

Descrição:

Filme de poliuretano transparente e impermeável em rolo, sem brilho, fino e conformável à pele. Adesivo à base de poliacrilato protegido por papel siliconado branco, com planimetria de 1cm² e com película protetora superior. Sistema único de aplicação com fita vermelha. Com taxa de transmissão de vapor (MVTR) de 930g/m²/24h. Livre de látex. Não estéril.

Indicações:

Para uso externo somente em pele íntegra na fixação de curativos, drenos, sondas, cateteres e dispositivos médicos. O Hypafix transparent mantém a região de aplicação protegida e seca, permitindo que o paciente se banhe com o produto no local. Pode permanecer aplicado de um a vários dias dependendo do estado da pele.

Hypafix® transparent:

Adesivo Transparente e Impermeável para Fixação de Curativos, Drenos e Cateteres

Advertências e Precauções:

Utilizar o produto apenas para a finalidade a que se destina. Não usar em pacientes com intolerância conhecida a adesivos acrílicos. Para uso externo somente em pele intacta. Para fixação somente; não é recomendado para forte apoio.

Composição do produto:

Filme transparente de poliuretano e poliéster com MVRT 930g/m²/24h, adesivo de poliacrilato protegido por papel siliconado branco com planimetria e película com fita vermelha para facilitar aplicação.

Características	Benefícios
Filme ultrafino sem brilho	Conformável e imperceptível na pele
Recortável	Pode ser adaptado conforme necessidade
Permeável a vapores	Evita maceração na pele
Radiotransparente	Permite exames radiológicos
Adesivo de poliacrilato	Adesividade confiável

Modo de Uso:



1. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade. Selecione o tamanho apropriado de Hypafix transparent que deve ser recortado com uma tesoura



2. Aplique o filme sobre o curativo e fixe-o na pele, sem tocar no adesivo



3. Remova o papel protetor da superfície adesiva e aplique o filme sobre o curativo, deixando uma pequena parte para ser fixada sobre a pele. Remova a película com fita vermelha

Esterilização: Não estéril

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente em local seco, arejado e ao abrigo da luz

Fabricação: BSN Medical - Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000059

Validade do Registro: Não aplicável

NCM: 30.05.9090

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

Apresentação:

Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
72378-00	0276256	72378-00	5cm X 10m	Cx. c/ 01 unid.
72378-01	0276257	72378-01	10cm X 10m	Cx. c/ 01 unid.
72378-02	0276258	72378-02	15cm X 10m	Cx. c/ 01 unid.