



Leukomed® T Plus

Curativo Pós-Operatório

Descrição:

Cobertura em filme de poliuretano e poliéster transparente, impermeável à água, sujidades e microrganismos, com alta permeabilidade a vapores úmidos e compressa central absorvente composta de viscose e polipropileno, recoberta por uma fina camada de polietileno microperfurada. Com adesividade segura e hipoalergênica, à base de poliacrilato, com papel protetor siliconado de cor branca e sistema de aplicação com faixa vermelha. Livre de látex. Estéril.

Fino e flexível, adapta-se aos contornos do corpo com facilidade, com alto MVTR (930g/m²/24h), permite a evaporação de líquidos diminuindo a umidade na ferida operatória e o risco de macerações, protege contra a fricção, impermeável à água, sujidades e bactérias, reduz o risco de infecção e permite que o paciente se banhe com o curativo no local.

Indicações:

Indicado para cobertura de ferida operatória. Também é indicado para proteger feridas com exsudato moderado, tais como lacerações, cortes, arranhões ou queimaduras leves. O produto pode permanecer até 7 dias dependendo do estado da ferida e da condição da pele.

Advertências e Precauções:

Utilizar o produto apenas para a finalidade a que se destina. Não usar em pacientes com intolerância conhecida a adesivos acrílicos.

Contraindicações:

Não aplicável.

Composição do produto:

Filme transparente de poliuretano e poliéster, com uma almofada central absorvente composta de viscosa/polipropileno e recoberta por uma fina rede de polietileno microperfurada, papel siliconado branco para a proteção do adesivo e película de suporte superior com linha vermelha.

Características	Benefícios
Filme ultrafino	Conformável à pele
Bordas arredondadas	Permite que a cobertura permaneça por mais tempo no local
Excelente MVTR	Reduz o risco de maceração
Compressa central absorvente com película de polietileno microperfurada	Absorção do exsudato e não deixa aderir na ferida
Filme de suporte com linha vermelha	Facilita a aplicação
Impermeável à água, sujidade e bactéria	Segurança, menor risco de infecção

Modo de Uso:

1. Escolher o tamanho mais adequado à área a ser coberta.
2. Limpar a região de acordo com as orientações médicas.
3. Retirar o papel protetor e aplicar sobre a ferida, sem esticar o filme para não fazer bolha.
4. Friccionar o filme com a mão para aquecimento, para melhor fixação do curativo. Remover a película de suporte superior através da linha vermelha.
5. Trocar o curativo de acordo com as orientações do profissional de saúde.

Esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Armazenar em local limpo, seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz

Fabricação: BSN Medical Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000051

Validade do Registro: Não aplicável

NCM: 30.05.9090

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

Apresentação:				
Código NART	Código Símplo	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
72382-00	027303	72382-00	7,2cm X 5cm	Cx. c/ 50 unid.
72382-01	027304	72382-01	8cm X 10cm	Cx. c/ 50 unid.
72382-02	027305	72382-02	8cm X 15cm	Cx. c/ 50 unid.
72382-03	027306	72382-03	10cm X 25cm	Cx. c/ 50 unid.
72382-05	027307	72382-05	10cm X 35cm	Cx. c/ 50 unid.