



Leukomed® I.V. Film Cobertura para Cateter Venoso

Descrição:

Filme transparente de poliuretano e poliéster, fino, arredondado e sem brilho, impermeável, com taxa de transmissão de vapor (MVTR) de 930g/m²/24h, adesivo de poliacrilato protegido por papel branco siliconado e suporte superior com linha vermelha, para aplicação única. Duas tiras de fixação e uma tira de identificação estéreis, permanecendo por até 7 dias. Apresentações com e sem janela. Livre de látex. Produto estéril.

Indicações:

Indicado para fixação de cateter venoso periférico ou central. Transparente, permite a visualização do óstio de inserção do cateter venoso. Fino, macio e flexível, confeccionado para garantir a fixação segura e duradoura de cateteres venosos centrais, periféricos e cânulas. Impermeável, não permite a entrada de água ou microrganismos, oferecendo segurança na prevenção contra infecções, permite que o paciente se banhe com a cobertura no local.

Permite a evaporação de vapores úmidos, reduzindo o risco de macerações e acúmulo de umidade na região de inserção do cateter. Embalagem unitária.

Advertências e Precauções:

Utilizar o produto apenas para a finalidade a que se destina. Não usar em pacientes com intolerância conhecida a adesivos acrílicos.

Contraindicações:

Não aplicável.

Composição do produto:

Filme transparente de poliuretano e poliéster com adesivo de poliacrilato, papel siliconado branco e película superior com linha vermelha. Três fitas estabilizadoras.



Características	Benefícios
Filme extrafino	Conformável à pele
Bordas arredondadas	Permite que a cobertura permaneça por mais tempo no local
Excelente MVRT	Diminui o risco de maceração
3 fitas estabilizadoras	Segurança na estabilização do cateter, podendo permanecer por até 7 dias
Filme de suporte com linha vermelha	Facilita a aplicação
Fácil aplicação	Segurança, menor risco de infecção

Modo de Uso:

1. Abra o envelope e retire o curativo.
2. Vire o curativo e retire a fita estabilizadora para estabilizar o cateter, importante que não tampe o orifício da inserção do cateter.
3. Sem retirar todo o papel siliconado, levante as duas abas do papel branco siliconado para centralizar a aplicação do Leukomed I.V. Film.
4. Com a mão dominante, deslize sobre filme transparente, realizando um aquecimento do filme, com a mão não dominante, tire a película de papel branco siliconado.
5. Centralize a fenestra e retire o papel branco siliconado.
6. A fita vermelha indicativa orienta a direção correta de retirar o papel que protege o curativo.
7. Após o aquecimento, retire o papel superior de proteção linha vermelha.
8. Utilize uma fita para identificação ou identifique na fenestra.

Esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Armazenar em local limpo, seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz

Fabricação: BSN Medical - Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000052

Validade do Registro: Não aplicável

NCM: 30.05.9090

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

Apresentação:					
Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Estabilizadora	Quantidade
72390-04	0271294	72390-04	4,5cm X 4,5cm (s/ fenestra)*	n.a (somente filme quadrado)	Cx. c/ 50 unid.
72390-00	0271295	72390-00	6cm X 8cm (c/ fenestra)	45mm x 2mm (2) / 40mm x 2mm (1)	Cx. c/ 50 unid.
72390-05	0271296	72390-05	7cm X 9cm (c/ fenestra)	45mm x 2mm (2) / 40mm x 1mm (1)	Cx. c/ 50 unid.
72390-03	0271297	72390-03	8,5cm X 11,5cm (c/ fenestra)	45mm x 2mm (2) / 38mm x 1mm (1)	Cx. c/ 50 unid.

* Apresentações 4,5cm X 4,5cm não tem fenestra e poliéster, sem tiras de identificação.