



Leukomed® Control

Curativo pós-operatório com compressa transparente

Descrição:

Cobertura em filme transparente, ultrafino, impermeável, com bordas arredondadas MVTR 930g/m²/24h. Com adesividade segura e hipoalergênica, à base de adesivo acrílico protegido com papel protetor siliconado e sistema de aplicação superior de linha vermelha. Possui compressa central transparente de polímero de hidrogel com áreas livres de hidropolímero para flexibilidade extra e transpirabilidade. Livre de látex. Estéril.

Indicações:

Indicado em feridas agudas secas ou com níveis de exsudado ligeiro, tais como feridas cirúrgicas, queimaduras superficiais de espessura parcial, zonas doadoras de pele, lacerações e escoriações. O produto pode permanecer por até 7 dias, dependendo do estado do adesivo e da condição da pele.

Advertências e Precauções:

O Leukomed® Control destina-se a ser utilizado uma única vez. Não utilizar a embalagem se já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do curativo somente é garantida com a embalagem intacta.

O Leukomed® Control pode ser utilizado em feridas infectadas apenas sob prescrição de um profissional de saúde.

Não utilizar em doentes com sensibilidade conhecida à glicerina ou hidrogéis. Em caso de intolerância, remover o curativo e limpar cuidadosamente a ferida com água ou soro fisiológico estéril.

O curativo pode ser umedecido com soro fisiológico estéril para uma remoção mais fácil.

Os fragmentos de gel que permaneçam no leito da ferida, depois da remoção do curativo, podem ser eliminados através de irrigação com soro fisiológico estéril ou água.

Durante o processo de cicatrização ocorre uma remoção de tecido não viável, inicialmente, a ferida pode parecer maior. Se a ferida continuar a crescer após as primeiras trocas de curativo, consulte um profissional de saúde.

Como o Leukomed® Control cria um ambiente que favorece o crescimento de novos vasos sanguíneos, os vasos recém-formados sendo mais frágeis podem produzir ocasionalmente um fluido de ferida sanguinolento. Em caso de hemorragia excessiva, o

Leukomed® Control

Curativo pós-operatório com compressa transparente

curativo pode ser utilizado em conjunto com um curativo de alginato.

Monitorar o curativo atentamente. O Leukomed® Control pode permanecer aplicado por até sete dias, dependendo do estado da ferida. A duração total de contato (quando o tratamento requer a aplicação consecutiva de curativos) é de 30 dias.

Não utilizar o produto depois da data de validade indicada.

Não existe informação que suporte a utilização de preparações tópicas medicinais em conjunto com o Leukomed® Control.

Apenas para utilização externa.

Contraindicações:

O Leukomed® Control não é indicado para implantação cirúrgica, para controle de hemorragias abundantes, queimaduras de 3º grau, nem para colocar dentro de cavidades ou seios profundos. Não é adequado para utilização sob ligaduras de compressão, nem em radioterapia.

Composição do produto:

Filme transparente de poliuretano ultrafino, MVTR 930g/m²/24h. Com adesividade à base de adesivo acrílico, papel de proteção siliconado e sistema de aplicação superior de linha vermelha. Compressa central transparente de polímero de hidrogel com áreas livres de hidropolímero.

Características	Benefícios
Filme Extra fino	Conformável a pele
Bordas arredondadas	Permite que a cobertura permaneça por mais tempo no local
MVTR 930g/m ² /24h	Diminui o risco de maceração
Bordas arredondadas com adesivo acrílico	Segurança na proteção da ferida pós-operatória, podendo permanecer por até 7 dias
Filme de suporte com linha vermelha	Facilita a aplicação
Compressa central transparente absorvente	Permite total visualização da ferida pós-operatória com absorção de exsudato

Modo de Uso:

1. Limpe a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais e mantenha a pele seca sem nenhuma umidade.
2. Selecione um tamanho do curativo de forma que a compressa cubra pelo menos 2 cm da pele perilesional.
3. Não recorte a compressa central transparente, para manter a impermeabilidade e adesividade do curativo.
4. Retire o curativo estéril da embalagem.
5. Remova a película protetora branca siliconada, para expor a superfície adesiva.
6. Segure o curativo pelas abas, aplicando-as da direita p/ esquerda e com a compressa central virada para a ferida.
7. Fixe cuidadosamente as bordas.
8. Remova cuidadosamente a película superior de linha vermelha.
9. Inspeção a ferida frequentemente através da compressa central transparente.
10. O produto pode permanecer por até 7 dias, dependendo do estado do adesivo e da condição da pele.

Esterilização: Esterilizado por Radiação Gama

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Proteger da umidade e conservar a uma temperatura inferior a 25°C

Fabricação: BSN Medical - Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000149

Validade do Registro: 20/02/2027

NCM: 30.05.9090

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

Apresentação:

Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
73230-00	314114	73230-00	5,0cm X 7,0cm	10 unidades
73230-01	314115	73230-01	7,0cm X 10,0cm	10 unidades
73230-02	314116	73230-02	8,0cm X 15,0cm	10 unidades
73230-03	314117	73230-03	10,0cm X 24,0cm	5 unidades
73230-05	314118	73230-05	10,0cm X 35,0cm	5 unidades