

Cutimed® Siltec® Heel

Espuma de poliuretano em formato de calcâneo



Descrição: Silicone perfurado com adesivo

Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 7mm, tiras superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca impressa, impermeável mas, com alta permeabilidade a vapores úmidos. Composto por camada de contato em silicone perfurado, com adesivo protegido por filme de polietileno. Produto estéril a óxido de etileno. O produto pode ser recortado se necessário. Livre de látex. Embalagem estéril.

Indicações:

O Cutimed® Siltec® Heel Plus é indicado para prevenção e tratamento de feridas com exsudato baixo a alto. Úlceras venosas e arteriais, lesão por pressão estágio 1 ou estágio 2, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos de pele e áreas doadoras, lacerações ou abrasões.

Advertências e Precauções:

Cutimed® Siltec® Heel Plus encontra-se embalado para utilização única. Não reutilize nem volte a esterilizar para evitar o risco de transmissão de fluidos corporais ou tecido contaminado entre pacientes. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Elimine material aberto ou não utilizado da própria embalagem. Verifique se a ferida apresenta sinais de infecção e trate-a de acordo com as práticas clínicas. Exclusivamente para uso externo. Remova o curativo antes de uma sessão de radioterapia. Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.

Contraindicações:

Não utilize em pacientes com sensibilidade conhecida a nenhum dos componentes do produto.

Cutimed®

Composição do produto:

- Silicone perfurado com adesivo
- Espuma de poliuretano
- Tiras termo seladas
- Filme de poliuretano

Características	Benefícios
Curativo autoadesivo de silicone perfurado	Adesivo suave e seguro
Camada de contato com a ferida de silicone suave perfurado	Silicone perfurado para a passagem do exsudato mais viscoso
Espuma de poliuretano 7mm com tiras termosseladas	Absorção e retenção do exsudato, melhor distribuição da pressão
Filme de poliuretano com marca impressa	Película protetora na parte superior do produto, impermeável à água, fluidos corporais e microrganismos patogênicos, e permeável à troca gasosa

Modo de Uso:

- 1- Limpe a ferida de acordo com as boas práticas clínicas.
- 2- Certifique-se de que a área da pele circundante esteja seca.
- 3- Escolha um curativo do tamanho adequado que cubra a pele íntegra ou a ferida e se sobreponha aos limites.
- 4- Abra a embalagem e retire o curativo. Certifique-se de que está esterilizado.
- 5- Remova a película de proteção e aplique-a com o lado do silicone adesivo voltado para a pele íntegra ou ferida.
- 6- Evite esticar o curativo.
- 7- Pode ser recortado se necessário.
- 8- Se necessário, o Cutimed® Siltec® Heel pode ser utilizado em combinação com outros curativos, por exemplo Cutimed® Sorbact® (feridas infectadas) ou Cutimed® Gel (para feridas secas com tecido necrótico).
- 9- Cutimed® Siltec® pode ser utilizado numa ferida infectada para além de terapia antimicrobiana, sob supervisão médica.
- 10- O Cutimed® Siltec® Heel pode permanecer no local da ferida por até 7 dias, dependendo das condições da pele íntegra ou da exsudação da ferida.
11. Remova cuidadosamente da ferida a fixação do curativo e o Cutimed® Siltec®, descartando-os.
- 12- Antes de aplicar uma nova cobertura, certifique-se de que a pele perilesão esteja limpa e seca.

Esterilidade: Estéril por Óxido de Etileno

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Cutimed® Siltec® deve ser guardado num ambiente seco. Não exponha diretamente à luz do sol.

Fabricação: BSN Medical – Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000155

Validade do Registro: 02/01/2028

NCM: 30.05.9090

	Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
	73288-05	298704	73288-05	16cm X 24cm	Caixa com 05 unidades



Profundidade da Ferida

- Superficial
- Cavitária
- Superficial + Cavitária

Nível do Exsudato

- Seco a baixo
- Baixo a moderado
- Moderado a alto
- Alto a excessivo

Tipo de Tecido

- Necrótico
- Esfacelos (liquefação)
- Infecção
- Granulação
- Epitelização