

Cutimed® HydroControl

Matriz de gel de hidropolímero



Descrição:

Curativo de polímero de hidrogel composto por poliacrilóildimetil taurato, água e glicerol, com malha de polipropileno impregnada aos orifícios (Flexipores), recoberto por filme de poliuretano rosa impermeável à água bactérias, porém à vapor permeável. Sem bordas, flexível, altamente adaptável aos contornos do corpo devido seus poros, com adesivo suave. Uso único. Embalagem estéril.

Mecanismo de ação:

O exsudato é absorvido através da matriz de gel hidropolímero, o fluido move do intertício para o leito da ferida através do efeito osmótico, o desbridamento autolítico é favorecido através da umidade oferecida.

Devido ao efeito osmótico que ocorre no desbridamento autolítico, o leito da ferida fica preparado para a cicatrização da ferida. Favorece a produção de nutrientes, enzimas e fatores de crescimento permitindo um ambiente ideal para novos tecidos em formação.

Indicações:

O Cutimed® HydroControl é indicado para feridas secas e para feridas crônicas com níveis de exsudado ligeiro a moderado, como úlceras de várias etiologias (venosas, arteriais), úlceras nas pernas, úlceras por pressão, úlceras diabéticas.

O Cutimed® HydroControl pode ser utilizado sob uma bandagem de compressão.

Advertências e Precauções:

O Cutimed® HydroControl destina-se a ser utilizado uma única vez.

Não utilizar a embalagem se já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do penso/curativo apenas se encontra garantida quando a embalagem não está aberta nem danificada antes da utilização.

Não utilizar em doentes com sensibilidade conhecida à glicerina ou hidrogéis. Em caso de intolerância, remover o penso/curativo e limpar cuidadosamente a ferida com água ou soro fisiológico estéril.

O curativo pode ser umedecido com soro fisiológico estéril para uma remoção mais fácil.

Os fragmentos de gel que permaneçam no leito da ferida depois da remoção do curativo podem ser eliminados através de irrigação com soro fisiológico ou água.

Durante o processo de cicatrização normal, o desbridamento autolítico (remoção de tecido não viável da ferida) pode fazer com que a ferida pareça maior inicialmente. Se a ferida continuar a crescer após as primeiras trocas de curativo, consultar um profissional de saúde. Como o Cutimed® HydroControl cria um ambiente que favorece o crescimento de novos vasos sanguíneos, os vasos recém-formados sendo mais frágeis podem produzir ocasionalmente um fluido de ferida sanguinolento. Em caso de hemorragia excessiva, o curativo pode ser utilizado em conjunto com um curativo de alginato.

Monitorar o curativo atentamente. O curativo pode permanecer colocado até sete dias, dependendo do estado da ferida. A duração total de contato (quando o tratamento envolve a aplicações consecutivas de curativos) é de 30 dias.

Podem ser necessárias medidas apropriadas de suporte como a compressão em caso de úlceras venosas nas pernas, ou medidas de redução da pressão em caso de síndrome do pé diabético e úlceras por pressão, antibioticoterapia sistêmica, etc. Não utilizar o produto depois da data de validade indicada.

O curativo tende a inchar em contato com água. Portanto, recomenda-se minimizar a duração do banho na utilização durante períodos prolongados. Não existe informação que suporte a utilização de preparações tópicas medicinais em conjunto com o Cutimed® HydroControl. Não utilizar em radioterapia. Apenas para utilização externa.

Cutimed®

Contraindicações:

O Cutimed® HydroControl não é indicado para implantação cirúrgica, tratamento de feridas altamente exsudativas, controle de hemorragias abundantes, queimaduras de 3º grau e tecidos de epitelização. Não utilizar em feridas cavitárias.

Composição do produto:

Polímero de hidrogel, composto por poliacrilildimetil taurato, água e glicerol, com malha de polipropileno impregnada aos orifícios (Flexipores), recoberto por filme de poliuretano rosa impermeável.

Características	Benefícios
Desbridamento autolítico	Hidrata e remove o tecido desvitalizado, estimulando a limpeza do tecido
Equilíbrio da umidade	O hidropolímero cria um equilíbrio da umidade em feridas exsudativas
Comformabilidade anatômica	Pode ser recortado e se adapta aos contornos anatômicos
Potencial para a estimulação da cicatrização	Efeito osmótico que ocorre no desbridamento autolítico, o leito da ferida fica preparado para a cicatrização da ferida. Favorece a produção de nutrientes, enzimas e fatores de crescimento permitindo um ambiente ideal para novos tecidos em formação

Modo de Uso:

Preparação

1. Limpe a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais.
2. Certifique-se de que a pele circundante está seca.
3. Selecione um curativo que ultrapasse as bordas da ferida em pelo menos 2 cm.
4. Abra a embalagem e retire o curativo Cutimed® HydroControl. Garanta a esterilidade.
5. Caso seja necessário o recorte do curativo, mantenha a película de papel protetor de filme de poliuretano.
6. Aplique o Cutimed® HydroControl com a face aderente voltada para a ferida e retire o papel protetor de filme de polietileno.
7. Cubra com um curativo secundário adequado para a quantidade de exsudato.
8. A frequência da mudança do curativo depende do estado da ferida. Assim na avaliação pode ser necessária a troca apenas do curativo secundário, após avaliação do profissional.
9. É possível manter o produto na ferida por até 7 dias e a frequência de mudança depende do estado da ferida.
10. Para trocar o Cutimed® HydroControl, retire cuidadosamente o curativo.
11. Limpe a ferida segundo a boa prática clínica antes de colocar um novo curativo.

Aplicação

1. Retire o curativo da embalagem
2. Remova a película transparente inferior para expor a superfície adesiva
3. Segure o curativo pela aba branca e aplique com a superfície adesiva virada para a ferida
4. Retire a aba branca e alise cuidadosamente o curativo
5. Se for necessário, utilize um curativo secundário de fixação. O Cutimed® HydroControl é compatível com películas transparentes e tiras de fixações
6. A avaliação dos estágios da cicatrização é fundamental

Esterilidade: Estéril por Radiação Gama

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Transporte e armazenagem: Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Proteger da umidade e conservar a uma temperatura inferior a 25° C

Fabricação: BSN Medical – Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000153

Validade do Registro: 26/06/2027

NCM: 30.05.9019

Formas de apresentação do produto médico: O produto é embalado individualmente em papel tipo pouch. O produto então pode ser comercializado em cartucho de papel cartão contendo 05 ou 10 unidades

	Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
	73231-00	314119	73231-00	4,5cm x 4,5cm	Caixa com 10 unidades
	73231-01	314120	73231-01	7,5cm x 7,5cm	Caixa com 10 unidades
	73231-02	314121	73231-02	10cm x 10cm	Caixa com 10 unidades
	73231-03	314122	73231-03	15cm x 15cm	Caixa com 5 unidades

Legenda:

Profundidade da Ferida

-  Superficial
-  Cavitária
-  Superficial + Cavitária

Nível do Exsudato

-  Seco a baixo
-  Baixo a moderado
-  Moderado a alto
-  Alto a excessivo

Tipo de Tecido

-  Necrótico
-  Esfacelos (liquefação)
-  Infecção
-  Granulação
-  Epitelização