

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Descrição: curativo antimicrobiana superabsorvente, estéril que reduz a carga microbiana através de captura de microrganismos por princípio físico de hidrofobicidade, sem químicas e ativos. Ele é composto de uma camada de acetato de DACC - Cloreto de Dialquil Carbamoil, que fica em contato com a ferida, combinada com um núcleo superabsorvente com partículas de SAP e um revestimento com tecido não tecido branco repelente a água, que evita o extravasamento do exsudato. absorve e retém o exsudato, reduzindo o risco de maceração e possibilitando um ambiente úmido para a ferida. A alta capacidade de absorção do Cutimed® Sorbion® Sorbact® ajuda a diminuir a frequência da troca do curativo. O curativo pode ser usado sob terapia compressiva.

Modo de ação :

O Cutimed® Sorbion® Sorbact® atrai microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Estreptococos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, por captação física, conforme mostrado in vitro. Esses microrganismos são eliminados a cada troca de curativo.

Indicação de Uso

O Cutimed® Sorbion® Sorbact® se destina ao tratamento de feridas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas com níveis de exsudato de elevados a excessivos, como feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, lesões por pressão, úlceras diabéticas e úlceras dos membros inferiores.

Contraindicações:

Não existem contraindicações conhecidas com relação ao uso do Cutimed® Sorbion® Sorbact®. Deve ser dada atenção às advertências e precauções.

Advertências e Precauções

- Se a ferida em tratamento piorar, não melhorar ou se for observado algum efeito colateral, consulte um profissional de saúde especializado.
- Não use o produto nos olhos, nas membranas mucosas ou em feridas cavitárias.
- O curativo pode aumentar de volume consideravelmente após a absorção de fluido.
- Não use em sangramentos arteriais ou em ferimentos com hemorragia excessiva.
- Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do curativo.
- A camada verde (acetato de cloreto de dialquil Carbamoil) sempre deve ser aplicada em contato direto com o leito da ferida, para permitir que os microrganismos sejam atraídos para o curativo.
- Caso o curativo seque ou fique aderido à ferida, umedeça ou molhe com SF 0,9% o curativo para ajudar a removê-lo e evitar trauma dos tecidos em processo de cicatrização.

- Não use o curativo juntamente com produtos oleosos, como pomadas, cremes e soluções, pois eles podem diminuir a captação dos microrganismos.

Esterilidade: Estéril por Óxido de Etileno

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Armazenamento: Transporte e Armazenagem: Proteger da luz direta e umidade, armazenar e ambiente limpo e seco

Fabricação: BSN Medical – Alemanha Registro na ANVISA: 10224000200

Tamanhos:

CUTIMED SORBION SORBACT	Apresentações
72698-00000-03	10 x 10
72698-00001-03	10 x 20
72698-00003-03	20 x 30

Indicações:

 Esfacelos (liquefação)	 Moderado a alto
 Infecção	 Alto a excessivo

Legenda:

Profundidade da Ferida	Nível do Exsudato	Tipo de Tecido
 Superficial	 Seco a baixo	 Necrótico
 Cavitária	 Baixo a moderado	 Esfacelos (liquefação)
 Superficial + Cavitária	 Moderado a alto	 Infecção
	 Alto a excessivo	 Granulação
		 Epitelização