

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Compressas

Nome comercial do Produto: Compressa de Gaze sem RX Pacote Neve

Nº do Registro ANVISA: 81855830015

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze Pacote são embaladas em sacos plásticos leitosos de polietileno. Pacotes contendo 500 unidades por pacote.

Compressa

Os pacotes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque.

INDICAÇÃO DE USO:

As Compressas de Gaze é indicado para uso em procedimentos hospitalares em tratamentos e procedimentos cirúrgicos para absorção de líquidos, sangue ou exsudatos e secreções e assepsias, também servindo de anteparo traumático para as vísceras e tecidos.

DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze sem RX Pacote são confeccionadas em tecido de alta qualidade, devidamente beneficiado e trabalhado para fins cirúrgicos. É totalmente isento de impurezas e agentes contaminantes como alvejante óptico e resíduo de amido. Totalmente hidrófilo, com alto poder de absorção e retenção de líquidos.

As Compressas de Gaze sem RX Pacote Neve são confeccionadas em tecido 100% algodão.

São confeccionadas e comercializadas nas dimensões:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79106-01	COMP.11F.7,5X7,5cm PCT/500 SAFE	789817286052-1
79106-40	COMP.09F.7,5X7,5cm PCT/500	789817286040-8
79106-02	COMP.13F.7,5X7,5cm PCT/500 SAFE	789817286010-1
79106-06	COMP.13F.10X10cm PCT/500 SAFE	789817286161-0



MODO DE USO:

As embalagens devem ser abertas somente no momento do uso.

A compressa deve ser usada de forma fechada "dobrada".

Utilizar em cirurgias e procedimentos em geral, aplicando a compressa para absorção de fluídos.

Ao término do procedimento cirúrgico, se este for o caso, deve-se proceder a recontagem das compressas utilizadas, garantindo a segurança do procedimento.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para o fim a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

Não aplicável.

VALIDADE:

Válido por 05 anos após a data de fabricação.