


INTRUÇÃO DE USO

FIX TUB NÃO ESTÉRIL - FIXADOR DE SONDAS/ DRENOS / CATETERES

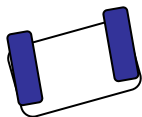

O FIX TUB -FIXADOR DE SONDAS / DRENOS / CATETERES é uma espécie de adesivo de uso médico-hospitalar, desenvolvido para fixação de estruturas tubulares(sondas uretrais , drenos tubulares, cateteres), proporcionando um seguro posicionamento e fixação na pele. Propicia maior conforto ao paciente, uma vez que a superfície adesiva do produto é hipoalergênica e não provoca lesões na pele.


COMPOSIÇÃO

O FIX TUB – FIXADOR DE SONDAS / DRENOS / CATETERES é composto por:


- 1. Manta de Polietileno branco com superfície inferior adesiva em acrílico hipoalergênica, anatômico, sem rebarbas.**
- 2. Fita de fixação (contact) com as duas abas adesivas com sistema abre e fecha para fixação.**
- 3. Fita Plástica de cor azul –claro para colocar na ponta da adesiva do contact.**
- 4. Papel siliconado nas superfícies inferior da manta e superior da fita plástica**
- 5. Medidas: 9,5 cm largura x 4,0 cm de altura**

INSTRUÇÕES DE USO


- Retire o papel siliconado da face inferior fixando-o no local desejado
- Retire o papel siliconado da face superior

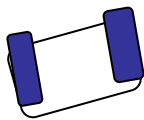

- Posicione a sonda, cateter ou tubo no meio do adesivo transparente

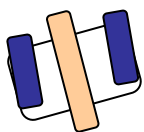

- Una as folhas do adesivo transparente uma com a outra.

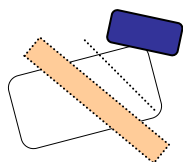

CUIDADOS ESPECIAIS

- A aderência do produto é perdida parcialmente se o mesmo for deslocado e/ou mudado de local, ou ainda, se a pele estiver molhada ou gordurosa, portanto, a manta deve ser aderida em local seco e limpo do corpo do paciente. Obedecendo os cuidados especiais, sua durabilidade na pele é até 48 horas (02 dias).
- Não utilizar o produto caso a pele NÃO esteja íntegra .

PRECAUÇÃO

- Não utilizar o produto se a embalagem individual estiver previamente aberta ou violada.
- Uso único. Descartar após o uso em local apropriado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em temperaturas abaixo de 30°C, em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE

Todos os produtos fabricados pela MDL recebem na sua embalagem um número de lote e uma data de validade. A MDL não assegura o prazo de validade para os produtos que tiverem sua embalagem previamente aberta ou danificada.

DATA DE VALIDADE

A validade do produto é de 24 meses (02 anos) a partir da data da fabricação.

LOTE E VALIDADE: VIDE EMBALAGEM

Produto Não Estéril

REG ANV 80114230005

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

O FIX TUB - FIXADOR DE SONDAS/ DRENOS / CATETERES é comercializado em embalagem primária e secundária.

Embalagem Primária: O produto é embalado individualmente, em embalagem de papel grau-cirúrgico, contendo nela as seguintes informações: Dados do Fabricante, SAC, Registro MS, Lote/Validade, Instrução de Uso, Responsável Técnico., Composição, Condições de armazenamento, Recomendações, Indicador de esterilidade, Finalidade, Advertências, Código de barras, LATEX FREE.

Embalagem secundária: Caixa de papelão, etiquetadas contendo as seguintes informações :

- **Quantidade por unidade**
- **Dados do Fabricante**
- **Lote/ fabricação/Validade**
- **Responsável Técnico**
- **Registro Anvisa**
- **SAC/ Atendimento ao cliente**
- **Condições de armazenamento**

