



Hypafix® skin sensitive

Adesivo com Silicone para Fixação de Curativos, Cateteres e Drenos

Descrição:

Adesivo hipoalergênico em silicone rolo não estéril, composto por material em non-woven de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico em poliacrilato e silicone. Livre de látex.

Indicações:

Indicado para todos os tipos de pele, principalmente pele altamente sensível ou frágil para fixação de curativos, cateteres e drenos. Não estéril, deve ser aplicado somente sobre pele íntegra. O produto se mantém seguro e pode permanecer no local de um a vários dias, dependendo da condição da pele e adesividade.

Advertências e Precauções:

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Composição do produto:

Tecido não tecido de poliéster, adesivo de poliacrilato e silicone, película protetora do adesivo em filme de polietileno transparente com abertura central. Livre de látex.

Características	Benefícios
Poroso transpirável	Reduz o risco de maceração
Elástico	Adaptável aos contornos anatômicos
Radiotransparente	Não precisa ser removido para exames radiológicos
Adesivo em silicone	Remoção atraumática
Recortável	Pode ser adaptado conforme necessidade
Adesividade em silicone	Adesividade confiável

Modo de Uso:

1. Recorte um pedaço do Hypafix skin sensitive de acordo com o tamanho requerido.
2. A película de apoio é separada. Remova a primeira parte.
3. Aplique o produto acima do curativo e cuidadosamente aplique na pele. Dobre o outro lado para trás e coloque o restante do produto acima do curativo.

A troca pode ser feita de um a vários dias, dependendo do estado da ferida e da condição da pele.

Esterilização: Não estéril.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de umidade, luz e calor.

Fabricação: BSN Medical – Alemanha.

Registro na ANVISA: 10224000154.

Validade do Registro: Não aplicável.

NCM: 30.05.9090.

Responsável Técnica: Juliana K. Schuh – CRF/SP 65.617.

Apresentação:				
Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
79966-01	298717	79966-01	5cm X 5m	Cx. c/ 01 unid.
79966-02	298718	79966-02	10cm X 5m	Cx. c/ 01 unid.
79966-03	298719	79966-03	15cm X 5m	Cx. c/ 01 unid.