

VIVANOMED FOAM KIT P, M e G PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA VIVANO



Tamanho P



Tamanho M



Tamanho G

Descrição

Kit em bandeja contendo Espuma VivanoMed, Hydrofilm e VivanoTec Port. A Espuma VivanoMed é feita de Poliuretano flexível e estéril. Seus microporos auxiliam distribuição da pressão negativa de modo uniforme. Os poros ajudam na drenagem do exsudato e na formação de tecido de granulação, além de reduzirem o risco de inflamação. VivanoMed acelera o processo de cicatrização, é de fácil remoção e não deixa resíduos no leito da ferida. Hydrofilm é uma película fina, transparente, autoadesiva e permeável com alto índice MVTR que garante a transpiração da pele e bloqueia a passagem de germes e bactérias. O VivanoTec Port é feito de silicone estéril, flexível e macio e permite a drenagem adequada do exsudato.

Indicação

Indicado na Terapia por Pressão Negativa junto com a unidade de tratamento Vivano.

Composição

VivanoMed Foam: Poliuretano/Hidrofóbico.

Hydrofilm: Poliuretano e Poliacrilato.

VivanoTec Port: Copolímero de Estireno-Acrílico, Elastômero de Silicone, Filme de Poliuretano transparente.

Apresentação

Kit estéril em bandeja contendo espuma, Hydrofilm e VivanoTec Port. As espumas possuem opção de tamanhos P (10 x 7,5 x 3,3 cm), M (18 x 12,5 x 3,3 cm), G (25 x 15 x 3,3 cm) e XG (2 unidades de 30 x 30 x 1,5 cm).

Instruções de uso

Preencher a cavidade da ferida com a espuma VivanoMed e

fixar sua abertura com Hydrofilm de modo a não deixar nenhuma entrada de ar. Realizar um pequeno corte no filme de aproximadamente 2cm e posicionar ali a extremidade do VivanoTec Port. Conectar o dreno na unidade de tratamento Vivano e iniciar a terapia.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Códigos

Tamanho	Código
P	409730
M	409727
G	409724

Validade

05 anos

Fabricante

Paul Hartmann AG - Alemanha.

Registro – Anvisa (MS)

80170310072

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

HARTMANN

