

RESERVATÓRIO VIVANOTEC

PARA UNIDADE DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA VIVANO



Descrição

Reservatório para retenção de exsudato proveniente da drenagem por Pressão Negativa realizada com equipamento VivanoTec. Possui sachê e filtro anti-odores.

Indicação

Indicado em Terapia por Pressão Negativa Vivano.

Composição

Polipropileno, policloreto de vinila transparente, copolímero de estireno metilmetacrilato, borracha de etileno - propileno-dieno, polietileno, carbono ativo, polioximetileno, gel superabsorvente (sal de poliacrilato de sódio), PTFE.

Apresentação

Duas opções de reservatórios: 300 mL para feridas pouco exsudativas e 800 mL para feridas muito exsudativas. Produto estéril embalado individualmente

Instruções de uso

Após realizar o curativo com VivanoMed e Hydrofilm, conectar a ponta da conexão do VivanoTec Port na conexão da extensão do reservatório. Encaixar o reservatório na

parte posterior da bomba VivanoTec e iniciar a terapia. O reservatório VivanoTec deve ser alterado se estiver cheio, ou o mais tardar após uma semana (7 dias). Caso necessário, outro reservatório deverá ser encaixado e conectado ao dreno para dar sequência ao tratamento.

Precauções

Manter a bomba na posição vertical para que o reservatório seja preenchido de maneira correta.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Códigos

Reservatório	Código
300 mL	409525
800 mL	409522

Validade: 5 anos

Fabricante: Atmos Medizin Technik GMBH & Co. KG. - Alemanha

Registro Anvisa: 80170319027

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

